

## Seek & Sable Seek

### Popis :

Seek -indikátor kazů obsahuje barvivo v glykolové bázi které zbarvuje kazivý dentin do červené barvy.

Sable Seek -indikátor kazů blízkých dřeni, obsahuje barvivo v glykolové bázi které zbarvuje kazivý dentin do tmavě zelené až černé barvy.

### Indikace :

Kazivý dentin se zbarvuje do červené nebo tmavě zelené barvy. Pro praktické použití je Caries indikátor využíván v těchto případech :

- 1 ) Pro identifikaci kazu v obtížně přístupných místech, např. : v podsekřivých místech a při preparacích kavit I. a II. třídy
- 2 ) Jako prevence proti nadměrnému hloubení hlubokých kazů. Pokud mají hlouběji položená místa být schopna remineralizace musí být zabráněno odkrytí pulpy.
- 3) Seek se používá jako jednoduchý způsob identifikace kořenových kanálků.

### Doporučná technika použití:

- a) Prázdna stříkačka se připevní na konec 30ml IndiSpense stříkačky: našroubováním na její závit.
- b) Pro zvýšení kvality stabilizujte píst standardní stříkačky druhou rukou. K zabránění vzájemné kontaminace používejte pro každý odběr vždy novou stříkačku.
- c) Na nově naplněnou stříkačku nasadte luerní uzávěr a nebo aplikační špičku.

### 2 Další postup

- a) Odstraňte uzávěr ze stříkačky a našroubujte na ní pevně White Mini Brush nástavec. Pro vaši optimální kontrolu doporučujeme držet stříkačku pístem do dlaně.
- b) Naneste indikátor na plochu, kterou chcete testovat. Nechte indikátor 10 vteřin působit, pak opláchněte a vysušte.
- c) Odstraňte vnější kazivý dentin nízko otáčkovým kulovým vrtákem nebo exkavátorem. Opakujte jednou nebo vícekrát, tak jak je třeba, dokud není veškerý kaz odstraněn.
- d) Preparovanou plochu restaurojte dále podle Vaší volby. Doporučujeme užití Ultra Blend světlem tuhnoucího podložkového materiálu, a pak Amelogen 1 um universální kompozitní materiál nebo pro méně zatížené plochy Amelogen Microfill kompozitní materiál ( oba k dispozici ve 12 odstínech ).

### Upozornění :

- a) Nástavce jsou k jednorázovému použití.
- b) Zabraňte rozstříkávání indikátoru. Skvrny je možné odstranit z kazivých ploch mechanicky. Pokud je barvivo obtížné odstranit z jiných ploch než je kaz, použijte peroxid vodíku nebo roztok chlornanu sodného. ( stejný jako se užívá pro čištění kořenových kanálků).
- c) Doporučujeme užití Ultradent Syringe ochranných povlaků , zatavených pomocí Impulse Sealeru pro zabránění kontaminace stříkaček.