

Opalescence Trèshwhite ORTHO

Výrobce: Ultradent Products, Inc.

Popis:

Trèshwhite ORTHO je inovovaný systém domácího bělení na bázi Opalescence PF gelu. Je to příjemný nosič z tenké fólie naplněný bělicím gelem s mátovou příchutí k domácímu použití pro pacienty s nasazenými rovnátky. Obsahuje 8% peroxid vodíku, který odstraňuje bakterie a zubní plak okolo breket. Předchází vzniku zubního kazu a zlepšuje zdravý gingivální tkáň. Nízká koncentrace peroxidu vodíku efektivně jemně bělí celou plochu zubu i pod breketami, díky volnému průchodu a působení ve sklovině. Pacientům zajistí zářivý zdravý úsměv během ortodontické léčby, stejně jako po sejmutí ortodontických pomůcek. Obsahuje PF složku (potassium nitrát a fluoridy), snižuje citlivost, předchází zubnímu kazu a posiluje sklovinu. Jednoduchá aplikace z předplněného nosiče, a univerzální velikost umožní nasazení na každý úsměv. Nosič kryje horní i dolní zubní oblouk v rozsahu až k oběma prvním molárům, je předtvarovaný, a proto se Trèshwhite ORTHO snadno přizpůsobí zubnímu oblouku s nasazenými rovnátky i když má pacient nepravidelný zubní oblouk.

Označení oblouku :

“U” horní “L” dolní

Pacient kit obsahuje 10 horních a 10 dolních nosičů

Nosí se 30-60 minut denně.

Aplikace :

Aplikuje se na denně na 30 až 60-minut, po dobu 5 – 10 dnů.

Postup aplikace dle přiloženého obrázku:

1-vyjměte nosič z balení

2-nosič nasadte na zubní oblouk

3-lehce nasajte

4-vyjměte vnější barevný nosič

5-formu lehce přiadaptujte

6-ponechte v ústech denně 30- 60 minut. Poté nosič odstraňte a vyčistěte si zuby.

*Při nasazování nosiče dbejte opatrnosti. Při kontaktu vnitřní fólie s breketami, může dojít k přehnutí fólie v barevném nosiči. Pokud k tomu dojde, lehce fólii v nosiči narovnejte a dokončete aplikaci novým nasazením.

Upozornění :

1/ Bělicí přípravky uchovávejte mimo dosah dětí

2/ Před bělením je nutné vyšetření zubního lékaře. Některé diskolorace jsou určeny pro jiné ošetření než je bělení. Protetické práce, korunky a výplně se nevybělí

3/ Použití se doporučuje pouze u pacientů se zdravými dásněmi. K iritaci dásní může dojít u individuálního periodontálního onemocnění

4/ Tento výrobek není vhodný pro noční aplikace

5/ Někdy se mohou některé části zubů vybělit rychleji nebo méně stejnoměrně než ostatní.

Výsledky mohou být odlišné. U 5% populace jsou zuby resistantní proti bělicím přípravkům.

Bělení zubů s velkými amalgámovými výplněmi může vést k prosvítání barvy kovu.

6/ Kyselé potraviny/ džusy, mohou způsobit citlivost u zubů, pokud jsou konzumovány krátce po bělení

7/ Nekuřte a nejezte s nasazeným nosičem během bělení

8/ Nepoužívejte během těhotenství a při kojení

9/ Nevystavujte gel tepelnému záření a slunci, nezmrazujte

10/ Gel nepolykejte. Obsahuje peroxidy a fluoridy. V případě požití většího množství může být škodlivý.

Upozornění : Malé procento pacientů se během bělení setká s citlivostí , která je většinou mírná a přechodná. Pokud se objeví větší potíže, kontaktujte svého zubního lékaře.

Trvanlivost: 12 měsíců. Uchovávejte v chladu.

Distribuce v ČR: **Hu-Fa Dental a.s.**, Moravní 909, 765 02 Otrokovice, tel.: 577 926 226-9, fax: 577 926 205
e-mail: hufa@hufa.cz, www.hufa.cz