

Trèswhite Supreme™

Výrobce: Ultradent Products, Inc.

Popis:

Trèswhite Supreme je inovovaný, revoluční systém domácího bělení na bázi Opalescence PF gelu. Je to příjemný nosič z tenké fólie, naplněný bělicím gelem a snadno se přizpůsobí každému úsměvu. Bělicí gel obsahuje 10% peroxid vodíku a dodává se v příchutích máta, broskev a žlutý meloun.

S Trèswhite Supreme ušetříte čas a peníze, protože nemusíte otiskovat ani zhotovovat modely. Vše je snadnější a připraveno přímo k použití. Forma (nosič) je již předplněna a určena k jednorázovému použití – odpadá plnění a čištění individuálních forem. Je to též skvělý způsob následné domácí péče po libovolném typu ordinačního bělení.

Nosič kryje horní i dolní zubní oblouk v rozsahu až k oběma prvním molárům, je předtvarovaný, a proto se Trèswhite Supreme přizpůsobí zubům snadněji než různé proužky, dokonce i když má pacient nepravidelný zubní oblouk.

Označení oblouku :

“U” horní “L” dolní

Pacient kit obsahuje 10 horních a 10 dolních nosičů

Aplikace :

Aplikuje se na denně na 30 až 60-minut, po dobu 5 – 10 dnů.

Postup aplikace dle přiloženého obrázku:

- 1-vyjměte nosič z balení
- 2-nosič nasadte na zubní oblouk
- 3-lehce přiadaptujte
- 4-vyjměte vnější barevný nosič
- 5-formu lehce vymodelujte dle zubů
- 6-ponechte v ústech 30- 60 minut

Upozornění :

- 1/ Bělicí přípravek uchovávejte mimo dosah dětí
- 2/ Před bělením je nutné vyšetření zubního lékaře. Protetické práce, korunky a výplně se nevybělí
- 3/ Použití se doporučuje pouze u pacientů se zdravými dásněmi. K iritaci dásní může dojít u individuálního periodontálního onemocnění
- 4/ Tento výrobek není vhodný pro noční aplikace
- 5/ Někdy se mohou některé části zubů vybělit rychleji nebo méně stejnoměrně než ostatní. Výsledky mohou být odlišné. U 5% populace jsou zuby rezistentní proti bělicím přípravkům. Bělení zubů s velkými amalgámovými výplněmi může vést k prosvítání barvy kovu.
- 6/ Kyselé potraviny/ džusy, mohou způsobit citlivost u zubů, pokud jsou konzumovány krátce po bělení
- 7/ Nekuřte a nejezte s nasazeným nosičem během bělení
- 8/ Nepoužívejte během těhotenství a při kojení
- 9/ Nevystavujte gel tepelnému záření a slunci, nezmrazujte
- 10/ Trèswhite Supreme je nutné uchovávat v chladničce

Upozornění : Malé procento pacientů se během bělení setká s citlivostí , která je většinou mírná a přechodná. Pokud se objeví větší potíže, kontaktujte svého zubního lékaře.

Trvanlivost: 12 měsíců