

# Trèswhite Supreme™ 15%

**Výrobce:** Ultradent Products, Inc.

## **Popis:**

Trèswhite Supreme 15% je inovovaný systém domácího bělení na bázi Opalescence PF gelu. Je to příjemný nosič z tenké fólie, naplněný bělicím gelem a snadno se přizpůsobí každému úsměvu. Bělicí gel obsahuje **15% peroxid vodíku** a dodává se v příchuti máta.

S Trèswhite Supreme ušetříte čas a peníze, protože nemusíte otiskovat ani zhotovovat modely.

Vše je snadnější a připraveno přímo k použití. Forma (nosič) je již předplněna a určena k jednorázovému použití – odpadá plnění a čištění individuálních forem.

Je to též skvělý způsob následné domácí péče po libovolném typu ordinačního bělení.

Nosič kryje horní i dolní zubní oblouk v rozsahu až k oběma prvním molárům, je předtvarovaný, a proto se Trèswhite Supreme 15% přizpůsobí zubům snadněji než různé proužky, dokonce i když má pacient nepravidelný zubní oblouk.

Označení oblouku :

“U” horní “L” dolní

Pacient kit obsahuje 10 horních a 10 dolních nosičů

## **Aplikace :**

Aplikuje se na denně na 15 až 20-minut, cca po dobu 5 – 10 dnů.

Postup aplikace dle přiloženého obrázku:

1-vyjměte nosič z balení

2-nosič nasadte na zubní oblouk

3-lehce přiadaptujte (přisajte)

4-vyjměte vnější barevný nosič

5-je – li potřeba, lehce domodelujte dle zubů

6-ponechte v ústech 15- 20 minut, pak vyndejte nosič a očistěte si zuby kartáčkem

## **Upozornění :**

1/ Bělicí přípravek uchovávejte mimo dosah dětí

2/ Před bělením je nutné vyšetření zubního lékaře. Některá zbarvení zubů mohou indikovat nutnost jiného ošetření než bělení. Protetické práce, korunky a výplně se nevybělí

3/ Použití se doporučuje pouze u pacientů se zdravými dásněmi. K iritaci dásní může dojít u individuálního periodontálního onemocnění

4/ Tento výrobek NENÍ určen pro noční aplikace

5/ Někdy se mohou některé části zubů vybělit rychleji nebo méně stejnoměrně než ostatní.

Výsledky mohou být odlišné. U cca 5% populace jsou zuby resistantní proti bělicím přípravkům.

Bělení zubů s velkými amalgámovými výplněmi může vést k prosvítání barvy kovu.

6/ Kyselé potraviny/ džusy, mohou způsobit citlivost u zubů, pokud jsou konzumovány krátce po bělení

7/ Nekuřte a nejezte s nasazeným nosičem během bělení

8/ Nepoužívejte během těhotenství

9/ Nevystavujte gel tepelnému záření a slunci, nezmrazujte

10/ Nepolykejte gel nebo zbytky po oplachu. Výrobek obsahuje peroxid vodíku a může obsahovat fluoridy. Spolykání většího množství může způsobit podráždění, nevolnost.

10/ Trèswhite Supreme 15% je nutné uchovávat v chladničce

Upozornění : Malé procento pacientů se během bělení setká s citlivostí , která je většinou mírná a přechodná. Pokud se objeví větší potíže, přerušete bělení a kontaktujte svého zubního lékaře. Pokud máte jakýkoli dotaz ohledně výrobku nebo ošetření, kontaktujte svého zubního lékaře.

Trvanlivost: 12 měsíců

Distribuce v ČR: **Hu-Fa Dental a.s.**, Moravní 909, 765 02 Otrokovice, tel.: 577 926 226-9, fax: 577 926 205  
e-mail: [hufa@hufa.cz](mailto:hufa@hufa.cz), [www.hufa.cz](http://www.hufa.cz)