

UltraCal® XS

Výrobce: Ultradent Products, Inc.

Popis: UltraCal XS je léčivá pasta pro endodontická ošetření s 35% hydroxidem vápenatým. Rentgenokontrastní, pH 12,5.

UltraCal XS se dodává ve stříkačkách o obsahu 1,2ml a aplikuje se kanylou Navi Tip (doporučená velikost 29G)

Indikace: UltraCal XS je používán při léčbě kořenových kanálků, jako léčivá vložka na dobu mezi endodontickými ošetřeními. Hydroxid vápenatý má díky vysokému pH významný antibakteriální účinek a stimuluje hojení kosti.

Postup: Odejměte uzávěr UltraCal XS stříkačky a nasad'te kanylu Navi Tip. Pastu aplikujte do vypreparovaného kořenového kanálku asi 3mm od apexu, zaplňujte pomalým pohybem směrem ven. Kanyla je neustále ponořena v materiálu. (viz. obr.1)

Upozornění:

1. UltraCal aplikujte s kanylou Navi Tip, minimálně 2mm od apexu. Kanyla musí být v kanálku vždy volně. Neaplikujte s kanylami, které budou v kanálku těsné.
2. Materiál používejte s opatrností. Při aplikaci na nežádoucí plochu, opláchněte proudem vody.
3. Kanyly jsou jednorázové.
4. Předplněné stříkačky jsou použitelné k opakovanému naplnění. Před aplikacemi je vždy vyčistěte a vydesinfikujte.

Distribuce v ČR: **Hu-Fa Dental a.s.**, Moravní 909, 765 02 Otrokovice, tel.: 577 926 226-9, fax: 577 926 205