

UltraEZ™®

Gel na snížení citlivosti

Popis:

UltraEZ™ je unikátní lepidlo a viskózní gel s obsahem 3% dusičnanu draselného a 0,11 % hm. fluoridového iontu, který trvale uvolňuje. UltraEZ je dodáván buď ve stříkačkách pro použití v individuálním nosiči nebo v předplněných univerzálních formičkách.

Indikace:

UltraEZ se používá k úlevě od stavu způsobeného citlivostí kořene, tepelnými a chemickými změnami, korunkami/můstky, po bělení, při patologických stavech parodontu, abrazi zubním kartáčkem atd.

Postup:

A. Při použití UltraEZ v univerzální předplněné formičce

1. Před použitím si pozorně přečtěte návod. UltraEZ v tenké a příjemné formičce se snadno adaptuje na každý úsměv. Kryje horní i dolní zubní oblouk rozsahu až k oběma prvním molárům.
2. Vyjměte z balení
3. Formu nasadte na zubní oblouk
4. Lehce přitlačte a vyjměte vnější formu
5. Lehce přiadaptujte a vymodelujte podle zubů
6. Ponechte v ústech 15 min. až 1 hod.

B. Při aplikaci UltraEZ stříkačkou do individuálně zhotoveného nosiče

1. Před použitím si pozorně přečtěte návod.
2. Zhotovte nosič podle potřeb pacienta. Viz návod na jeho výrobu v laboratoři (dále) nebo pošlete pracovní model se předepsaným zadáním práce distributorovi výrobků firmy Ultradent. Oblasti, které jsou citlivé, se před odesláním musí na modelu vyznačit. Pokud již pacient má individuální nosič na bělení, lze nanést UltraEZ do stejného nosiče stejným způsobem jako bělicí gel.
Poznámka: Pokud jsou jako důsledek předchozího chirurgického výkonu na parodontu přítomny velké nerovnosti povrchu, které mohou představovat problém při odstranění otisku ze zubů, lze je vyblokovat tmelem OraSeal®.
3. UltraEZ se nanáší z jednotkových stříkaček o objemu 1,2 ml. Na celý zubní oblouk se spotřebuje většina obsahu stříkačky. Pokud je citlivost lokalizovaná, naneste gel na postiženou oblast(i) a malé množství do oblastí stoliček, aby se nosič udržel ve své poloze.
4. Doba a počet nošení nosiče záleží na stavu pacienta a lékaři. Doporučené časy léčby se mohou pohybovat od 15 minut do 1 hodiny.
5. Nosič je nutné před jídlem sejmout. Po sejmutí nosiče by si měl pacient vyčistit zuby a opláchnout je vodou. Při oplachování Nepolykat. Nosič umyjte a uložte do pouzdra. Na každou aplikaci se má použít čerstvý gel.
6. Gel lze před nanesením do nosiče ohřát, aby se předešlo tepelnému dráždění.

Upozornění:

1. Pokud se vyskytnou nějaké problémy, má pacient přerušit léčbu a oznámit to svému zubnímu lékaři.
2. Pacienti by neměli polykat větší množství gelu UltraEZ. Přebytky při nasazování a zbytky po sejmutí se mají odstranit kartáčkem a opláchnout, Nepolykat.
3. Uchovejte mimo dosah tepelných zdrojů nebo slunečního záření. UltraEZ lze skladovat při pokojové teplotě.

Obecná upozornění:

1. Jen pro profesionální použití.
2. Před léčbou si přečtěte návod, upozornění a údaje o bezpečnosti materiálu. Použijte jen tak, jak je předepsáno.
3. Výrobek uchovejte mimo dosah tepla a slunečního světla.
4. Nevystavujte kůži kontaktu s pryskyřicí.
5. Omezte vliv silných chemikálií na oblast léčby.
6. Prověřte, zda pacient nemá na používané materiály alergii.
7. Hustotu materiálu vyzkoušejte před jeho použitím v ústech pacienta.
8. Písty stříkaček nikdy nestlačujte silou.
9. Používejte obaly na stříkačky Ultradent® Syringe Covers a/nebo mezi pacienty čistěte a dezinfikujte.
10. U všech světlem polymerizovatelných materiálů používejte standardní lampy.
11. Uchovejte mimo dosah dětí.

Návod k použití pro pacienta:

Gel naneste do nosiče, který zhotovil Váš zubní lékař. Vyčistěte si zuby a poté nasad'te nosič. Strany nosiče přitiskněte na zuby. Přebytečný gel odstraňte čistým prstem nebo měkkým kartáčkem. Dvakrát opláchněte, výplach nepolykejte.

Nosič vyčistěte měkkým kartáčkem a studenou vodou z vodovodu. Nosič uložte do pouzdra.

Poznámka: Návod pro pacienta ukazuje použití nosiče s patřičně ořezanými okraji.

Návod pro laboratoř:

1. Zhotovte a upravte model stejným způsobem jako ten, který se používá na bělení. Na suché a čisté oblasti sádrového modelu, kde se u pacienta projevuje citlivost, naneste 0,5-1 mm vrstvu pryskyřice Ultradent® LC Block-Out Resin (obrázky 1 a 2). Pryskyřici naneste také na oblasti, kde jsou nerovnosti povrchu atd. U parodontologických pacientů může lékař indikovat předoperační otisky. V těchto případech se místo pro pryskyřici vytvoří pooperačně díky apikálně posunutě a rekonturované gingivě.
2. Osvi'te LC Block-Out polymerační lampou (Ultra-Lume™) po 2 minuty. Lze také použít ručně drženou intraorální lampu (20-40 sekund na zub). Odstraňte kyslíkovou inhibiční vrstvu.
3. Na vakuovém tvarovači (Pro-Form) nahřejte Sof-Tray® fólii o tloušťce 0,035 palce (asi 0,9 mm) tak, aby se prostředek propadal asi o 2,5 cm. Spus'te sání a nasad'te změklou fólii na model. Zchlad'te a vyjměte model.
4. Hlavní části přebytku odstříhňte pilovitými nůžkami na fólie (Ultra-Trim™).
5. Zbytky, které přesahují okraje nosiče, odstříhňte tak, aby přesahovalo 4 – 6 mm na tkáň gingivy. Okraj nosiče upravte tak, aby nepřekážel anatomickým strukturám, jako jsou úpony frenula, valy, atd.
6. Nosič nasad'te zpátky na model, zkontrolujte, kde přesahuje. Jemně tepelně upravte hrany, najednou jeden kvadrant (Blazer® Micro Torch).
7. Okrajové části každého segmentu pevně tiskněte 3 sekundy vlhkým prstem na model. Pokud je daná oblast příliš krátká, jemně ji nahřejte a materiál nosiče natlačte do požadované polohy. Pokud se tento materiál příliš ztenčí, je nutné vyrobit nový nosič.

Při použití folií pouze pro UltraEZ:**Návod pro zubního lékaře a laboratoř:**

Zhotovte a vysušte sádrový model, patro a oblasti jazyka odřízněte. Pomocí vakuového odsávače nasad'te na model fólii Sof-Tray® tloušťky 0,035 palce (0,9 mm). Ochlad'te a sejměte. Na citlivé kořeny použijte na okraji gingivy pryskyřici LC Block-Out Resin na vyblokování místa pro UltraEZ. Doporučuje se, aby nosič přesahoval 2-3 mm na gingivu.