

# UltraProTX™ Leštící pasta

## Popis:

UltraPro Tx Prophy Pasta je leštící přípravek na sklovinu s přísadkou 1,23% fluoridových iontů a 5% dusičnanu draselného. Pasta je balena ve jednorázových kalíšcích s dávkou 2 gramy a je dostupná ve 3 zrnitostech a 3 příchutích.

## Použití:

Používá se k dentálním čistícím a leštícím úkonům jako součástí profesionální dentální profylaxe. Pozor: Profylatické pasty obsahující fluoridy nejsou považovány za náhradu lokální fluoridové léčby.

## Návod:

1. Používejte společně s prophy koncovkou a gumovým kalíškem.
2. Naplňte kalíšek koncovky: vtačte kalíšek do pasty pod mírným úhlem za chodu násadce při nízkých otáčkách.
3. Nanášejte pastu na zub rychlými, lehkými tahy za současného jemného naklonění okraje kalíšku.
4. Zkontrolujte a znovu naplňte leštící kalíšek – je třeba zabránit přílišnému tření na povrchu zubu.
5. Pravidelně oplachujte a odsávejte nebo nechte pacienta si vyplachovat.

## Upozornění a varování:

1. Před použitím si pozorně přečtěte celý návod.
2. UltraPro Tx Prophy pastu mohou používat pouze osoby profesionálně proškolené na leštění zubů.
3. Nepoužívejte u pacientů s alergií na fluoridy.
4. Nadměrné požití fluoridu může zapříčinit nevolnost a/nebo zvracení. NEPOLYKAT. Opláchněte a odsajte nebo nechte pacienta vypláchnout ústa.
5. UltraPro Tx Prophy Pasta může způsobit podráždění očí, dostane-li se do přímého kontaktu. Pacient i ošetřující by měli mít při používání tohoto produktu ochranné brýle. Jestliže došlo ke kontaktu s očima, neprodleně vyplachujte oči velkým množstvím vody po dobu 15 minut. Vyhledejte lékaře, jestliže podráždění přetrvává.
6. Ošetřující by měl mít při používání tohoto produktu ochranné rukavice. Opakovaný kontakt kůže s přípravkem může způsobit chronickou dermatitidu. Jestliže dojde ke kontaktu přípravku s kůží, umyjte důkladně mýdlem a vodou.
7. Abyste zabránili rozstříkávání přípravku během ošetření, nepřekračujte pracovní tlak 3,15 atm ( 45 psi ) při práci s násadcem a koncovkou.
8. Nepoužívejte zbytky otevřených kalíšků pasty - po každé proceduře zlikvidujte.

Další informace ohledně použití UltraPro Tx Prophy Pasty a dalších souvisejících produktů najdete na [www.ultradent.com](http://www.ultradent.com).