

UltraSeal XT® plus

Výrobce: Ultradent Products, Inc.

Popis: UltraSeal XT plus je thixotropní, pryskyřičné pečtidlo, které penetruje do okluzních fisur. Má 58% plniva, je radioopákní a eliminuje mikroprosakování s použitím PrimaDry sušící a aktivující složky. Aplikuje se kanylou Inspiral Brush

Indikace: UltraSeal XT plus se užívá na profylaktické zapečetění rýh a fisur

Postup:

Úvodní příprava:

1. Odejměte uzávěr za stříkačky Ultra Etch (leptadlo 35% kys. fosforečné) a pevně nasad'te kanylu Inspiral brush nebo Blue Micro na stříkačku.
2. Odejměte uzávěr za stříkačky 1,2 ml Prima Dry a pevně nasad'te kanylu Black Mini Brush nebo Blue Micro
3. Odejměte uzávěr za stříkačky UltraSeal XT plus a pevně nasad'te kanylu Inspiral Brush nebo Black Micro na stříkačku
4. očistěte fisury profylaktickým přístrojem, vysokotlakou vzduchovou abrazí nebo tenkým diamantovým vrtáčkem.
5. Stříkačku držte pístem v dlani k optimální kontrole aplikace.

Pracovní postup

1. Leptání – izolujte zub kofferdamem nebo absorbujícími pomůckami dle potřeby. Aplikujte Ultra-Etch na 15-20 sec. Poté opláchněte proudem vody a osušte.
2. Aplikujte PrimaDry a ponechte 5 sec. Osušte jemným proudem vzduchu. Neoplachujte.
3. Zapečete. Upravte délku štětín (povytažením z kanyly), doporučujeme délku okolo 1,2mm. Vytlačte malou kapku, aplikujte ji do hloubky fisury použitím třecího pohybu špičkou štětečku. Preferuje se používat menší množství materiálu.
4. Polymerace: Polymerujte povrch po dobu 20 sec., za použití standardní kvalitní halogenové lampy. Pokud užíváte vysokoenergetickou lampu, polymerujte po dobu 10 sec.

Upozornění:

1. Vyměňte uzávěry stříkaček, pokud je dlouho nepoužíváte.
2. Všechny kanyly jsou jednorázové.
3. Vyčistěte a desinfikujte 1,2 ml stříkačky před dalším použitím.
4. Nikdy neaplikujte Ultra-Etch nebo pečtidlo kanylou Black Mini Brush.
5. Vždy nasad'te kanylu bezpečně na stříkačku. Vždy vyzkoušejte průtok materiálu na míchací podložce před intraorální aplikací. Při neprůchodnosti nikdy nevyvíjejte tlak na píst. Vyměňte kanylu a znovu vyzkoušejte.
6. Kyselina může popálit a podráždit dásně, při styku s nežádoucí plochou okamžitě opláchněte.
7. PrimaDry je vznětlivý. Manipulujte s opatrností. Tento prchavý materiál zabezpečte, před vysoušením ve stříkačce, krytem na kanylu.
8. Neužívejte na pacientech se zvýšenou přecitlivělostí na akryláty a jiné pryskyřice.

Distribuce v ČR: **Hu-Fa Dental a.s.**, Moravní 909, 765 02 Otrokovice, tel.: 577 926 226-9, fax: 577 926 205
e-mail: hufa@hufa.cz, www.hufa.cz