

Universal Dentin Sealant®

Výrobce: Ultradent Products, Inc.

Charakteristika: Universal Dentin Sealant je biokompatibilní, nepolymerizovatelná, vysokomolekulární pryskyřice v těkavém organickém rozpouštědle.

Indikace: Zapečetěním dentinových tubulů může být významně minimalizována post-operační citlivost u pacienta. Universal Dentin Sealant zajišťuje ochranu proti iritaci způsobenou restorativními chemikáliemi. Formuje nepropustnou bariéru proti kyselinám, cementům a restorativním materiálům. Doporučuje se k pokrytí citlivých kořenů kořenů po root planigu, omezuje post-operační citlivost po výkonu uzavřením dentinových tubulů.

Použití:

1. Sejměte uzávěr ze stříkačky. Bezpečně nasad'te jednorázovou kanylu na stříkačku.
2. Ujistěte se, že jsou zuby dobře izolované a suché.
3. Tlakem na píst stříkačky zvlhčete štětiny kartáčku kanyly. Stříkačku držte pístem v dlani k optimální kontrole aplikace.
4. Potřete dno i stěny exponované kavity tenkou vrstvou Universal Dentin Sealant.
5. Jemně osušte po dobu 5 – 10 sekund.

Pozn.: Pokud je nutné použít podložku nebo liner, doporučujeme světlem tuhnoucí podložkový materiál Ultra – Blend Plus, namísto Universal Dentin Sealant.

Upozornění:

1. Všechny kanyly jsou jednorázové.
2. Vždy nasad'te kanylu bezpečně na stříkačku. Vždy vyzkoušejte průtok materiálu na míchací podložce před intraorální aplikací. Při neprůchodnosti nikdy nevyvíjejte tlak na píst. Vyměňte kanylu a znovu vyzkoušejte.
3. Někteří pacienti mohou být na organická rozpouštědla, proteiny a pryskyřice přecitlivělí. Vyhněte se kontaktu s pokožkou.

Distribuce v ČR: **Hu-Fa Dental a.s.**, Moravní 909, 765 02 Otrokovice, tel.: 577 926 226-9, fax: 577 926 205
e-mail: hufa@hufa.cz, www.hufa.cz