



EDENTA AG, Hauptstrasse 7, CH-9434 AU/SG – Switzerland
Tel.: +41 71 747 25 25 Fax: +41 71 747 25 50 e-mail: info@edenta.ch

EDENTA Etabl., Industriestr. 13, FL-9486 Schaanwald – Liechtenstein
Tel.: +423 375 20 50 Fax: + 423 375 20 55 e-mail: info@edenta.com



Informace o výrobku – skalpel na měkké tkáni:

Popis výrobku:

Skalpel na měkké tkáni je chirurgický nástroj k použití na dásně. Špička nástroje je vyrobena ze speciálního druhu keramiky.

Indikace:

- Zpřístupnění sulku před otiskováním a parodontální léčbou.
- Obnažení hlubokých krčkových kavit.
- Uvolnění poškozených zubů a nitrokostních implantátů.
- Papilektomie.
- Tvarování dásně.

Použití:

Skalpel na měkké tkáni lze používat pouze v turbíně. Používá se při otáčkách 300 000–500 000 ot./min. Nižší rychlost se aplikovat nesmí, mohla by způsobit poranění.

Chladicí sprej:

Chladicí sprej v turbíně musí být vypnutý. Chladicí sprej zabraňuje koagulaci ve vlasečnicích, což může způsobit zvýšené krvácení.

Dezinfekce:

Keramická pracovní část nástroje je choulostivější než běžná chirurgická ocel či wolfram-karbidové nástroje. Používejte pouze dezinfekční prostředky schválené Německou společností pro hygienu a mikrobiologii k použití na rotační a chirurgické nástroje.

Uchopte skalpel na měkké tkáni pinzetou a opatrně ho ponořte do dezinfekčního prostředku. Po určené době působení skalpel z dezinfekčního prostředku vyjměte, opláchněte ho pod tekoucí vodou a vysušte ho.

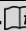
Čistíte-li skalpel na měkké tkáni v ultrazvukové čističce, pečlivě se ujistěte, že není umístěn v jedné nádobě společně s ostatními nástroji, zejména s diamantovými vrtáčky.

Důležitá poznámka:

Během dezinfikování skalpelu dbejte na to, aby choulostivou špičku nástroje nepoškodily ostatní nástroje.

Sterilizace:

Sterilizujte obvyklým způsobem v autoklávu.

Podrobná doporučení k použití jsou v souladu s normou DIN EN ISO 17664  www.edenta.com

Kontrola nástroje:

Než nástroj uskladníte, zkontrolujte vždy, zda nemá poškozenou špičku. Je-li špička opotřebovaná či poškozená, nástroj vyhodte.

Skladování:

Uchovávejte v suchu, chraňte proti kontaminaci.