

## ETCHING GEL

**Výrobce:**

SpofaDental a.s., Markova 238, CZ-506 46 Jičín, [www.spofadental.com](http://www.spofadental.com)

**Indikace:**

Naleptání povrchu skloviny nebo dentinu před zhotovením kompozitní nebo "bondované" amalgamové výplně, před zhotovením sendvičové kompozitní výplně se skloionomerním cementem, před adhezivní fixací estetické fasety keramické nebo kompozitní, před fixací inlaye, onlaye, kořenového čepu nebo korunky či můstku kompozitním cementem.

**Aplikace:**

Na stříkačku nasad'te aplikační kanylu a vyzkoušejte její průchodnost mimo dosah pacienta. Leptací gel se aplikuje na sklovinné okraje přímo kanylu a ponechá působit 20-30 s (v kombinaci s adhezivem Retensin se leptá pouze sklovina). Při leptání dentinu ("total" etching) se nanese leptací gel na dentin později o 15 - 20 s tak, aby působení nepřesáhlo 10 s. Leptací gel se odstraní důkladným opláchnutím proudem vody (15 s) a povrch kavity osuší proudem vzduchu nekontaminovaného olejem tak, aby sklovinné okraje zbělely a dentin nebyl přesušen, tj. neztratil přirozenou vlhkost. V případě kontaminace naleptaného povrchu např. slinou se opakuje leptání 10 s a opláchnutí a sušení obvyklým způsobem. Prodloužení leptací doby je doporučeno u zubů s vyšším obsahem fluoru nebo u dočasných zubů. Zvolený adhezivní systém se aplikuje dle příbalové informace.

**Upozornění:**

Při použití leptacího gelu výrobce doporučuje používat ochranné brýle, bezdotykovou techniku práce, je nezbytné chránit okolní měkké tkáně.

**Varování:**

Leptací gel obsahuje kyselinu fosforečnou. Je nutno vyvarovat se přímého působení na sliznici nebo pokožku. V případě náhodného kontaktu oplachujte postižené místo přebytkem vody. Při postižení očí vyhledejte peči očního lékaře.

**Dezinfekce:**

Použité aplikační kanyly sejměte a vyřaďte. Po uzavření stříkačky zátkou její povrch dezinfikujte běžným povrchovým dezinfekčním roztokem.

**Skladování:**

Skladujte v suchu, při teplotě do 23 °C, mimo dosah topných těles.

**Doba použitelnosti:**

2 roky

**Balení:**

3,5 g PE injekční stříkačka + 10 ks aplikačních jehel (samostatné balení)  
30 g Etching gel ve stříkačce + 20 ks aplikačních jehel + 2 prázdné stříkačky

Datum poslední revize: 12. 10. 2009

CE značka vytištěna na první straně návodu