

REPIN®
zinkoxid-eugenolová otiskovací hmota

Výrobce:

SpofaDental a.s., Markova 238, CZ-506 46 Jičín, www.spofadental.com

Složení:

bílá pasta: zinc oxide, calcium carbonate, rapae oil, taste ingredients

hnědá pasta: colophony, acetic acid, rapae oil, ingredients

Indikace:

- Otiskování bezzubých čelistí v individuální otiskovací lžici při zhotovování celkových snímacích náhrad.
- Provizorní fixace korunek, můstků a čepových zubů.

Kontraindikace:

Nejsou popsány.

Nežádoucí účinky:

Obsah eugenolu v přípravku může u zvláště citlivých pacientů vyvolat alergické reakce.

Aplikace:

Na třecí podložce se smísí obě pasty v objemovém poměru 1 : 1 v optimálním množství dle rozsahu otisku. Dokonale promísená otiskovací hmota se nanese do předem zhotovené individuální otiskovací lžice. Po aplikaci této lžice provede pacient několik funkčních pohybů ústy dle pokynů ošetřujícího. Po cca 2 minutách se otisk vyjme z úst a odlije kamennou sádrou. Pro dokonalý otisk měkkých řas se doporučuje rámování individuální otiskovací lžice termoplastickou otiskovací hmotou DENTIPLAST®.

Skladování:

V suché místnosti o teplotě 5 – 25 °C.

Doba použitelnosti:

2 roky

Balení:

300 g pasta bílá

125 g pasta hnědá