

SPECIFIKACE STERILIZACE ZRCÁTEK

29/06/2026

- Sterilizujte výhradně nasycenou vodní párou v parním autoklávu.
- Provedte validovaný sterilizační cyklus s následujícími parametry::

Metoda	Teplota	Doba expozice
Nasycená vodní pára – předvakuový cyklus	134°C	minimálně 5 minut

Upozornění pro zrcátka s rhodiovým povlakem

- Během sterilizačního cyklu zabraňte přímému kontaktu mezi nástroji.
- Nepoužívejte abrazivní kartáče ani agresivní čisticí prostředky.
- Chraňte prostředek před nárazy a třením o reflexní povrch.
- Pokud to výrobce výslovně nevalidoval, nepoužívejte ultrazvukové čisticí lázně.
- Po každém sterilizačním cyklu zkontrolujte, zda se na povrchu nevyskytují škrábance, zmatnění nebo poškození povlaku..

EXPORT DIVISION: Tel. +39 0584 93363 - Fax +39 0584 937167
STABILIMENTI/PLANTS: Via Sarzanese Valdera, 1331 - Bozzano - 55054 Massarosa (Lu)
Via delle Piagge, 1/A - Marlia - 55014 Capannori (Lu)
Via Fierla, 13 - Z.I. - 33085 Maniago (Pn)
BANCHE/BANKS: Deutsche Bank Viareggio - IBAN: IT 21 A 03104 13700 000000010733
Intesa San Paolo SpA Viareggio - IBAN: IT 20 E 06260 24803 000000019326
Monte Dei Paschi di Siena Viareggio - IBAN: IT 64 A 01030 24800 000063395758

