

POPIS PRODUKTU

ASA Dental S.p.A. dodává široký sortiment výrobků spadajících do kategorie zdravotnických prostředků, včetně diagnostických, parodontologických, chirurgických, restauračních, ortodontických a jednorázových. Opakovaně použitelné nástroje jsou vyrobeny z nerezové oceli a prodávány nesterilní. Všechna zařízení jsou určena pro zdravotnický personál a zdravotnické pracovníky a nemají žádné specifické omezení pro populaci, na které mohou být používána.

KONTRAINDIKACE

Absolutní kontraindikace: Aktivní infekce nebo sepse; jakákoli nedostatečná kvalita kosti, která může ovlivnit stabilitu implantátu; citlivost na materiály (kov atd.).

Obecné kontraindikace: Stav, ve kterých nelze zaručit ochranu pacientů; intraorální kontraindikace, jako jsou: anatomické změny, nedostatečná kostní tkáň nebo kostní tkáň nízké kvality. Křížové infekce způsobené nesprávným čištěním a sterilizací ze strany zdravotnického pracovníka.

NÁVOD K POUŽITÍ

- Udržujte nástroje vlhké a nenechte krev a/nebo tělesné tekutiny schnout na nástrojích. Proces dekontaminace může začít ihned po dokončení chirurgického zákroku.
- Demontujte nástroje s odnímatelnými díly; uvolněte nástroje s pohyblivými díly dle potřeby.
- Po čištění/dezinfekci je třeba vizuálně zkontrolovat demontované nástroje – zkontrolovat vychýlení, otřepy, ohnuté části nebo zlomené hroty. Mechanicky otestujte pohyblivé části (např. závěsy), abyste ověřili, že každý nástroj funguje v celém zamýšleném rozsahu pohybu.
- Nástroje musí být sterilizovány podle pokynů doporučených dezinfekčními prostředky/čisticími prostředky.

PŘEPRAVA

Je nutné dodržovat obecná bezpečnostní opatření pro manipulaci s nebezpečnými kontaminovanými/biologickými materiály.

SKLADOVÁNÍ A UCHOVÁNÍ

Nástroje musí být skladovány v suchém prostředí, při teplotě mezi 6 a 50°C, chráněny před zdroji tepla a otevřeným ohněm, přičemž je třeba se vyvarovat poškození obalového blistru. Nepoužívejte, pokud obalový blistr není neporušený.

Přístroje jsou dodávány nesterilní. Čištění a sterilizace musí být provedeny před každou chirurgickou operací. Po prvním použití je třeba nástroje důkladně vysušit, aby se před uskladněním odstranila zbytková vlhkost.

Dbejte na to, abyste neohrozili jejich výkon. Životní cyklus nástroje je fyzicky omezen normálním používáním a poškozením způsobeným nesprávným použitím.

LIKVIDACE

Nástroje z hliníku a oceli jsou recyklovatelné pouze v případě, že jsou před likvidací dekontaminovány. V opačném případě budou považovány za nebezpečný odpad a nakládáno s nimi bude v souladu s platnou legislativou.