



ADVANCED TISSUE-MANAGEMENT

The easy way to aesthetics.

PARASORB®HD Cone

GENTA-COLL®HD Cone



▶ EXTRAKCE ZUBU – PROBLÉM

Po extrakci zubu se kostní lůžko bez speciálního ošetření nehojí vždy optimálně.

To má za následek:

- ▶ Kost potřebná pro bezpečné usazení implantátu se nevytvoří dostatečně.
- ▶ Již po krátké době alveolární hřeben v místě extrakce atrofuje. Dostavění alveolárního hřebenu je nutné, pokud se má později vsadit implantát.
- ▶ Tyto časově náročné a drahé léčebné kroky, jsou pro pacienta bolestivé a ne zcela bez rizika.

Řešení 4 v 1 od firmy RESORBA®

1. Bezpečné a rychlé zastavení krvácení:

- ▶ není nebezpečí dodatečného krvácení
- ▶ stabilizace krevního koagula
- ▶ variantně s antibiotickou ochranou (gentamycinem) pro rizikové pacienty (např. kuřáky, diabetiky, pacienty se sníženou imunitou)

2. Zabránění atrofie alveolárního hřebenu:

- ▶ stabilizace zubního lůžka a tím zachování citlivé vestibulární lamely
- ▶ objemová stabilita alveolárního výběžku
- ▶ dlouhodobé zlepšení estetických a funkčních výsledků

3. Spolehlivá kostní regenerace:


- ▶ definovaná regenerační matrice
- ▶ angiokonduktivní a osteokonduktivní vlastnosti
- ▶ již po relativně krátké době vytvoření stabilního kostního lůžka pro implantát
- ▶ lépe kalkulovatelné dlouhodobé funkční a estetické výsledky

4. Vysoká spokojenost uživatele a pacienta:

- ▶ velmi jednoduché a bezpečné použití
- ▶ zjednoduší se následné léčebné kroky
- ▶ vysoký komfort pro pacienta
- ▶ vynikající poměr cena / výkon

Rozdíl:

PARASORB® HD Cone / GENTA-COLL® HD Cone

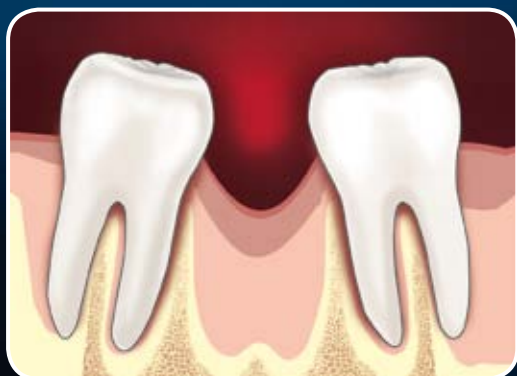

Schematické znázornění průběhu hojení po extrakci:

Vlevo: neošetřené zubní lůžko


Vpravo: zubní lůžko ošetřené dentálními kuželkami RESORBA®

RESORBA® DENTÁLNÍ KUŽELKY


Zkušenosti s dentálními kuželkami RESORBA®:

Použití kolagenových produktů pro budování a zachování kostního podkladu je již mnoho let součástí standardní terapie v zubním lékařství a čelistní chirurgii. Statistice použití dentálních kuželek RESORBA® dokládá účinnost a spolehlivost těchto produktů. To platí stejným způsobem pro ostatní osvědčené dentální produkty firmy RESORBA®, jako např. houby PARASORB® a GENTA-COLL *resorb*® MKG a šicí materiál RESORBA®.








Použití dentálních kuželek RESORBA® při extrakci zubu

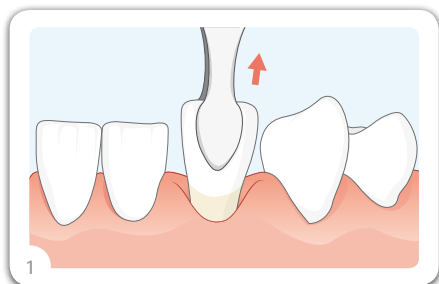

Použití dentálních kuželek RESORBA® při cystektomiích

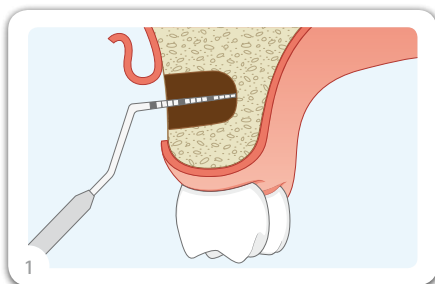

Použití dentálních kuželek RESORBA® při resekci kořenového hrotu

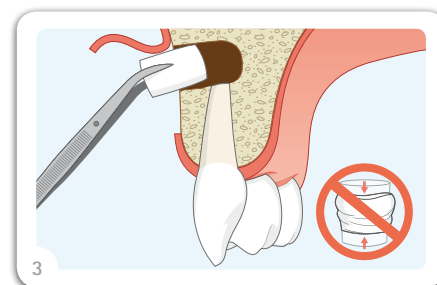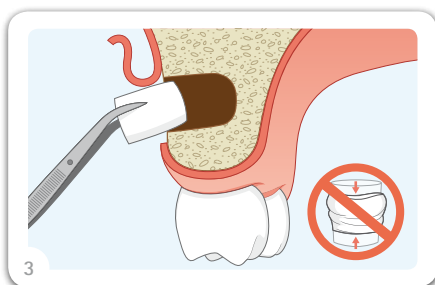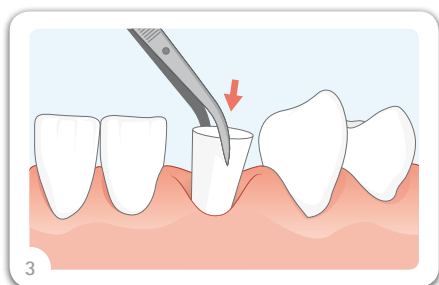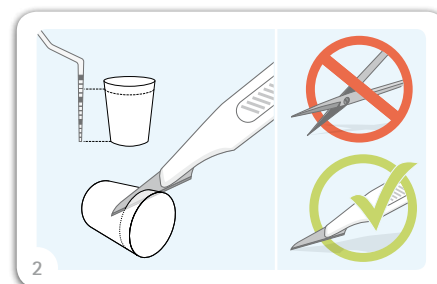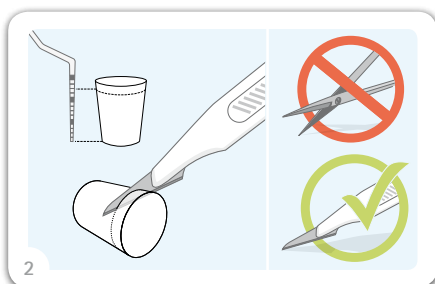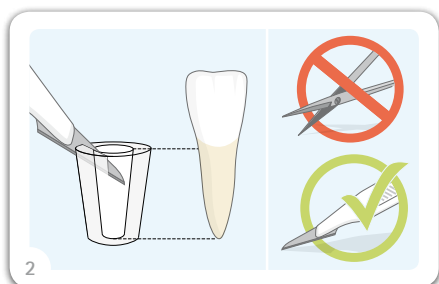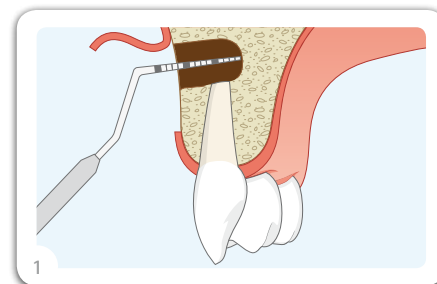

Formy podávání a velikosti balení

PARASORB® HD Cone a GENTA-COLL® HD Cone ve sterilním balení jsou k dostání v těchto velikostech balení:

REF		balení
DK1010	PARASORB® HD Cone jednoduché sterilní balení	10 kuželek
MK10	GENTA-COLL® HD Cone s antibiotikem, jednoduché sterilní balení	10 kuželek
MK11	GENTA-COLL® HD Cone s antibiotikem, dvojité sterilní balení	5 kuželek



Formy podávání a velikosti balení

PARASORB® HD Cone a GENTA-COLL® HD Cone
ve sterilním balení jsou k dostání v těchto velikostech balení:

REF		balení
DK1010	PARASORB® HD Cone jednoduché sterilní balení	10 kuželek
MK10	GENTA-COLL® HD Cone s antibiotikem, jednoduché sterilní balení	10 kuželek
MK11	GENTA-COLL® HD Cone s antibiotikem, dvojité sterilní balení	5 kuželek



RESORBA Wundversorgung GmbH & Co. KG, Am Flachmoor 16, 90475 Nürnberg, Germany
Tel. +49 9128 / 91 15 0 Fax +49 9128 / 91 15 91 infomail@resorba.com www.resorba.com
www.diedentalbox.com

CE 1275

LGAC InterCerti
Zertifiziertes QM-System
EN ISO 15485:2005 + AC:2007

LGAC InterCerti
Zertifiziertes QS-System
Medizinproduktehersteller
93/42/EWG Anhang II