

# ProxyPal®

Design by Dentists™



Zřetelné  
zakřivení

Krčkový  
okraj

Jemné  
zakřivení

3D tvarovaná matrice

## ProxyPal 3D tvarovaná matrice

ProxyPal je transparentní 3D tvarovaná matrice pro frontální použití. Předtvarované progresivní zakřivení pomáhá vytvořit incisální výplně se správným anatomickým tvarem a je zvláště navrženo pro velké proximální výplně a uzávěry frontálních diastémat, minimalizující riziko "černého trojúhelníku".

Abyste dosáhli perfektní výplně, byla matrice navržena tak, že zakřivení lineárně eskaluje podél své celé délky. Na jedné straně je zakřivení nezřetelné, což je ideální pro spodní řezáky. Na druhé straně je zakřivení zřetelné, což je vhodné pro uzavírání diastémat. Zatláčením nebo vytažením matrice je možno najít vhodnou pozici pro každý zub. Matrice má zkosenou hranu, která zasunutá do gingivální kapsy, stabilizuje matici během aplikace výplňového materiálu. Krčkový okraj brání vlhkosti z okolní tkáně, aby kontaminovala kavitu.



**DIRECTA AB** Finvids väg 8, P.O Box 723, 194 27 Upplands Väsby, SWEDEN  
info@directadental.com Phone +46 8 506 505 75

**DIRECTA**  
directadental.com



Indikace: třída IV, rozsáhlé třídy III, uzavírání diastémat

## Návod k použití




Opatrně aplikujte matrici tak, aby byl okraj zasunut do kapsy. Zatlačením/ vytažením vyhledejte ideální pozici pro nejlepší proximální tvar. V případě nutnosti matrici ustříhnete. Tvarování stabilizuje matrici během celého procesu.



Matrici je možno zafixovat tak, že ji necháte vstoupit na jedné straně na palatinální povrch a na straně druhé zpět do mezizubního prostoru. Tato technika může být použita s dvojitou proximální výplní.



Je důležité, aby si matrice zachovala správný krčkový tvar.

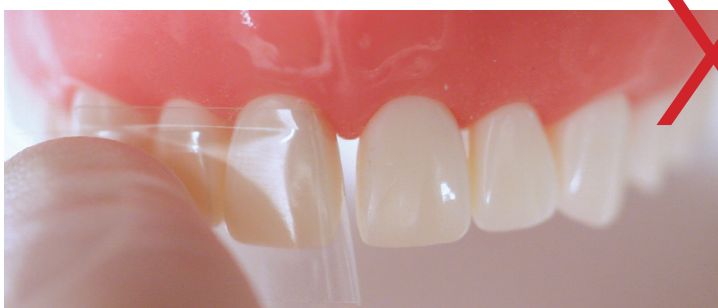

Tak, že ji nebudete tlačít na ošetřovaný zub.

