

DEZINFEKČNÍ A ČISTÍCÍ ROZTOK

Dentasept Special Rotative

DDEZINFEKČNÍ A ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK PRO VRTÁČKY, ROTAČNÍ A OSTATNÍ STOMATOLOGICKÉ INSTRUMENTÁRIUM PŘED STERILIZACÍ

- Výrobek je připraven k okamžitému použití
- Kompatibilní s celou řadou materiálů jako nikl, titan, karbid wolframu, hliníku, atd.
- Čas expozice: 15 min
- Vynikající mikrobiologická účinnost - působí proti všem obaleným virům (1)
- Možno použít v ultrazvukových myčkách.
- Zdravotnický prostředek třídy IIb (podle Nařízení 93/42/EEC)



(1) Institut Roberta Kocha doporučuje užití dezinfekčních prostředků, které mají omezenou virucidní aktivitu k přerušení infekčního řetězce. Podle RKI odpovídá omezená virucidní aktivita (účinná proti obaleným virům) aktivitě proti viru vakcinia a BVDV.

Dentasept Special Rotative®


Dezinfekční a čistící prostředek pro vrtáčky, rotační a ostatní stomatologické instrumentárium před sterilizací

NÁVOD K POUŽITÍ

Při manipulaci používejte vhodné rukavice.




Nalijte Dentasept Special Rotative do namáčecí nádrže. Neřed'te.

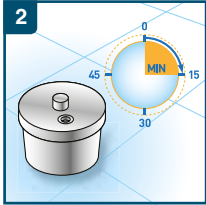

Nástroje zcela ponořte do roztoku, zakryjte a nechte působit. Dodržujte dobu namáčení 15 minut.



Vyjměte nástroje z roztoku a opláchněte pod tekoucí vodou.

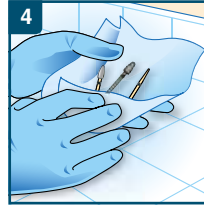

Nástroje řádně osušte a připravte ke sterilizaci.

Roztok měňte alespoň jednou denně.

MIKROBIOLOGICKÉ VLASTNOSTI

ÚČINNOST /PODMÍNKY	ČAS EXPOZICE
Baktericidní: EN 1040, EN 13727+A1, EN 14561	5 min
Účinnost proti kvasinkám: EN 1275, EN 13624, EN 14562	15 min
Tuberkulocidní: EN 14348, EN 14563	60 min
Aktivní do 5 minut proti PRV (náhrada za HBV), Herpes viru. BVDV (náhrada za HCV) a viru vakcínie.	

INFORMACE PRO OBJEDNÁNÍ

PRODUKT	BALENÍ	OBJEDNACÍ KÓD
Dentasept Special Rotative	1 x 2 L kanystr	XXXXXX
Dentasept Special Rotative	1 x 5 l kanystr	XXXXXX



POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.

ANIOS
Pavé du Moulin
59260 Lille-Hellemmes
0459 France

Distributor pro ČR:
ECOLAB S.R.O.
Voctářova 2449/5, Libeň
180 00 Praha 8
Česká republika

ECOLAB®

www.ecolab.com