

NÁVOD K POUŽITÍ

ORBI-Sept dezinfekce odsávacích zařízení

Vysoce účinný koncentrát pro čištění, dezinfekci a péči o odsávací systémy zubních souprav. Je bez aldehydu, nepění. Díky vysoké čistící síle odstraní i odolné usazeniny. Široké spektrum působení, vysoká kompatibilita, použitelný i v systémech se separátory amalgámu. Pravidelné používání zamezuje vzniku nepříjemných pachů.

Aplikujte připravený roztok dle Návodu na obsluhu zubní soupravy.

Spektrum účinnosti:

Baktericidní dle VAH/DGHM, EN 13727, EN 14561, levurocidní (Candida albicans) dle VAH/DGHM, EN 13624, EN 14562. Omezený virucidní účinek (účinný proti obaleným virům jako HBV, HIV, HCV) dle (RKI)/DVV.

Doby působení:

Baktericidní a Candida albicans dle VAH/DGHM při dezinfikování soupravy (vysoká zátěž): 2,0% 5 min / 1,0% 60 min

Baktericidní dle EN 13727 a EN 14561 (vysoká zátěž): 3,0% 2 min

Candida albicans dle EN 13624 a EN 14562 (vysoká zátěž): 3,0% 2 min

Obalené viry (HBV, HIV, HCV) dle (RKI)/DVV (se zátěží): 2,0% 2 min

100 g přípravku obsahuje:

7,5 g dimethyldioctylammoniumchlorid

0,6 g benzyldimethyldodecylammoniumchlorid

<u>název</u>	<u>objednací číslo</u>
láhev 2,5l	260252

Bezpečnostní instrukce:

H 302 Zdraví škodlivý při požití.

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

H400 Vysoce toxický pro vodní organismy. Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle.

PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo vlasy): Okamžitě svlékněte kontaminovaný oděv. Omyjte pokožku vodou / sprchou.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vypláchněte vodou. Pokud je to možné, vyjměte kontaktní čočky. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře / lékaře.

Obsah / obal zlikvidujte v souladu s místními / regionálními / národními / mezinárodními předpisy.

Obsahuje didecyldimethyl-ammoniumchlorid, n-(3-aminopropyl)-n-dodecyl-propan



DANGER



PRISMAN GmbH
Otto-Hahn-Ring 6-18
64653 Lorsch