

Sekusept plus

Kapalný koncentrovaný dezinfekční prostředek určený k dezinfekci a čištění nástrojů z kovu, skla a plastů, anesteziologického příslušenství aj.

Sekusept plus je deklarován jako zdravotnický prostředek, třída IIb



Výhody pro uživatele:

- účinný proti bakteriím (včetně TBC), mikroskopickým kvasinkovitým i vláknitým houbám a některým virům (včetně HBV a HIV)
- široké spektrum účinnosti při krátké expozici
- neobsahuje aldehydy, KAS ani fenoly, antimikrobiální účinek je zajištěn obsahem glukoprotaminu
- příjemná nedráždivá vůně
- velmi dobrý čistící účinek
- vhodný do ultrazvukových lázní
- nemá agresivní účinky vůči materiálům čištěných nástrojů, obsahuje inhibitor koroze

Složení: antimikrobiální účinné látky, neinogenní tenzidy, komplexotvorné látky, které zvyšují rozpouštěcí a čistící schopnost, inhibitor koroze, barvivo, parfém

Obsah účinných látek ve 100 g Sekuseptu plus: 25,0 g glukoprotaminu

Doporučené ředění Sekuseptu plus	koncentrace (%)	doba expozice
Účinnost proti bakteriím dle EN13727 (D), kvasinkám dle EN13624 (D)	1,00 (10 ml/l)	5 min
	1,00 (10 ml/l)	15 min
Účinnost proti obaleným virům HIV, HBV, HCV testováno na Vaccinia a BVDV (DVV/RKI)	1,00 (10 ml/l)	5 min
Dezinfekce nástrojů (včetně TBC) (DGHM/VAH)	1,50 (15 ml/l)	1 h
	3,00 (30 ml/l)	30 min
	4,00 (40 ml/l)	15 min
Účinnost proti HIV (DVV/RKI)	1,00 (10 ml/l)	0,5 min
Účinnost proti jiným virům - Adeno, Papova (DVV/RKI)	1,50 (15 ml/l)	1 h
Konzervace-uchování podávek	3,00	max. 24 hod

Návod k použití: před použitím zředit na vhodnou koncentraci studenou pitnou vodou

- nepřidávat jiný čistící ani dezinfekční prostředek
- použité nástroje vložit do připraveného roztoku Sekuseptu plus, přičemž je třeba dbát na jejich dokonalé ponoření

- po předepsané expozici předměty z roztoku vyjmout a opláchnout vodou (pitnou nebo sterilní)
- roztok pro dezinfekci se připravuje denně čerstvý, nepoužitý naředěný roztok lze uchovávat v uzavřené nádobě max. 14 dní
- uchovat v původním obalu, při teplotách 0°C až +25°C. Nepřipustíte vniknutí koncentrátu do kanalizace.

Při rozlití mechanicky odstranit pomocí savého materiálu (buničina apod.).

Obaly je možno spalovat v zařízeních k tomu určených.

Bezpečnost: Přípravek je klasifikován jako nebezpečný pro zdraví člověka dle nařízení (ES) č. 1272/2008 (Nebezpečí; Akutní toxicita, Kategorie 4; H302; Akutní toxicita, Kategorie 4; H332; Žíravost pro kůži, Kategorie 1B; H314; Akutní toxicita pro vodní prostředí, Kategorie 1; H400)

nebo směrnice 1999/45/ES (Xn; ZDRAVÍ ŠKODLIVÝ; R20; C; ŽÍRAVÝ; R22; N; NEBEZPEČNÝ PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ; R34-R50).

Před použitím čtěte přiložené pokyny.

Při práci s koncentrovaným přípravkem dodržujte pokyny pro bezpečné zacházení, které naleznete v příslušném bezpečnostním listu přípravku.

Bezpečnostní pokyny:

- Sekusept plus způsobuje poleptání, může poškodit zdraví při požití
- při práci s koncentrátem používejte vhodné osobní ochranné pracovní prostředky, především k ochraně očí a kůže, tj. zejména vhodné ochranné brýle nebo štítek a při každé práci ochranné rukavice. Po práci se dobře umyjte a ošetřete vhodným reparačním krémem (Silonda)
- uchovávejte mimo dosah dětí
- Informaci o firmách zabezpečujících zneškodnění obalů a nespotřebovaných částí výrobku obdržíte u pověřeného místně příslušného správního úřadu.

První pomoc:

- při zasažení očí okamžitě důkladně alespoň 15 min vyplachujte pokud možno vlažnou vodou
- při zasažení oděvu a pokožky okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení a omyjte velkým množstvím vody
- při náhodném požití nevyvolávejte zvracení
- ve všech těžších případech a vždy při zasažení očí nebo při požití vyhledat lékařskou pomoc

Doba použitelnosti: 60 měsíců

Balení:

6 l PE kanystr

2 l PE láhev baleno v kartonu po 4 ks