

zeta 1 ultra

INSTRUMENTS



**DISINFECTANT AND DETERGENT
FOR SURGICAL AND ROTATING INSTRUMENTS**

CONCENTRATE 1%

Bactericidal: EN 13727, EN 14561 (S. Aureus, P. Aeruginosa, E. Hirae)
Fungicidal: EN 13624, EN 14562 (C. Albicans, A. Niger)
Mycobactericidal, including tuberculocidal: EN 14348, EN 14563
(M. Terrae, M. Avium)
Virucidal, including HIV, HBV, HCV: EN 14476 (Poliovirus, Adenovirus)



Reorder N.
REF C810000

U118051/A

1000 ml e



0123



Zhermack
CLINICAL



Via Bovazecchino, 100 - 45021 Badia Polesine (Ro) - Italy
Tel. +39 0425 597 611 - www.zhermack.com

Made in Italy

CS - Dezinfekční prostředek pro chirurgické a rotační nástroje

Zeta 1 Ultra je koncentrovaný roztok bez obsahu aldehydů s širokým rozsahem účinku, který byl vyroben a testován v souladu s novými harmonizovanými evropskými předpisy o dezinfekci. Zeta 1 Ultra slouží k čištění a dezinfekci na vysoké úrovni chirurgických a rotačních nástrojů včetně velmi náročných typů (skalpelů, kleští, pinzet, frézy, zrcátek, sond atd.).

Složení:

100 g přípravku Zeta 1 Ultra obsahuje 18 g 3-aminopropyl-dodecyl-1.3- propanediaminu, 15 g alkyl-benzyl-dimethyl ammonium chloridu, neionové tenzidy, inhibitory koroze, aditiva, pomocné látky a potřebné množství vody do 100.

Rozsah účinku:

Baktericidní, fungicidní (včetně *Candida Albicans*, *Aspergillus Niger*), mykobaktericidní (včetně tuberkulocidního), virucidní.

Aktivita v suspenzi a povrchová aktivita testována v souladu s normami EN13727, EN13624, EN14348, EN14561, EN14562, EN14563. Virucidní aktivita testována v souladu s normou EN14476.

Použití:

Zeta 1 Ultra pokrývá kompletní rozsah účinku během 1 hodiny, jakmile je použitý v 1%-roztoku (pro dávkování použijte kalibrovanou odměrku nádoby a na 1 litr vody přidejte 10 ml přípravku Zeta 1 Ultra) při pokojové teplotě. Použití **ultrazvukového zařízení** při teplotě 30°C snižuje kontaktní čas na 10 minut. Opláchněte dezinfikované nástroje pod tekoucí vodou, vysušte a pak vysterilizujte v autoklávu nebo pomocí chemické sterilizace za studena přípravkem Zeta 2 Sporex. Připravený roztok zůstává stabilní po dobu 1 týdne (maximálně), ale pokud dezinfikujete velké množství nástrojů nebo nástroje silně kontaminované krví, slinami nebo organickým materiálem, měňte roztok častěji..

Výstrahy, opatření a podmínky skladování:

Tento výrobek je určen pro kvalifikované pracovníky, kteří jsou obeznámeni s požadovanými bezpečnostními normami. Použijte ochranné rukavice. Pracujte v dobře větraných prostorách. Dobře uzavřený výrobek skladujte na suchém a chladném místě.

Opatření:

Opláchněte a vyčistěte nádržku roztoku před nalitím roztoku Zeta 1 Ultra. Nemíchejte přípravek Zeta 1 Ultra s jinými dezinfekčními přípravky, zejména s přípravky, které obsahují aldehydy (formaldehyd, glutaraldehyd, glyoxal atd.), které způsobují zbarvení v tónech od růžové po hnědou. Zamezte styku s citráty, jodidy, nitáty, permanganáty, peroxidem vodíku a dalšími dezinfekčními/čisticími prostředky. Gáza a bavlna snižuje činnost přípravku Zeta 1 Ultra.

Bezpečnostní instrukce:

R50: Vysoce toxický pro vodní organismy. - R35: Způsobuje těžké poleptání. - R41: Nebezpečí vážného poškození očí. - R22: Zdraví škodlivý při požití.