



ASEPTOPRINT® Liquid

Vysoce aktivní dezinfekční koncentrát vhodný pro všechny otiskovací hmoty.

- Široké spektrum účinku
- Krátká doba expozice
- Vynikající kompatibilita materiálu
- Bez aldehydů, fenolů a chlórů
- Jednoduchá aplikace

ASEPTOPRINT® Liquid je koncentrát pro dezinfekci a čištění dentálních otisků zubů. Tato vysoce účinná dezinfekce je určena pro nejrůznější materiály jako algináty, polyethery, polysulfidy, A-silikony a C-silikony. ASEPTOPRINT® Liquid neovlivňuje tvarovou stabilitu otisků ani sádrových modelů. Neobsahuje aldehydy.

Předmět použití



- Pro dezinfekci dentálních otisků
- Vhodné pro alginát, polyéter, polysulfid, A-silikon i K-silikon a pro otiskovací lžice, voskové předtvary, ortodontické aparáty, laboratorní nástroje a zubní protézy.

Použití



Pro dezinfekci použijte vodný roztok podle dávkování. Pro odměření přesného množství koncentráту použijte víčko jako odměrku. Otisky ponořte kompletně. Důležité: Vzduch musí zcela uniknout ze všech dutých prostorů. Dodržte dobu expozice a nepřekračujte ji. Potom otisky opláchněte dostatečným množstvím vody. V závislosti na stupni znečištění vyměňujte roztok dvakrát až třikrát týdně. Doporučujeme denní výměnu lázně podle stupně znečištění. Roztok může být užíván maximálně po dobu 7 dnů. Pro hliníkové části se hodí jen omezeně.

Dávkování



	Koncentrát	+	Voda	Čas
1%	10 ml	+	990 ml	2 min
3%	30 ml	+	970 ml	1 min

Spektrum účinnosti / doba expozice



Baktericidní	1% v 2 min 3% v 1 min
Protikvasinkový	1% v 2 min 3% v 1 min
Obalené viry	1% v 2 min 3% v 1 min
BVDV	1% v 1 min
Virus hepatitidy B	1% v 2 min 3% v 1 min
Virus hepatitidy C	1% v 1 min
Virus herpes simplex	3% v 1 min
HIV	1% v 2 min 3% v 1 min
Virus chřipky typu A	3% v 3 min
Virus vakcín	1% v 2 min 3% v 1 min
Rotavirus	3% v 1 min

V souladu s Standardní metody DGHM, EN 1040, EN 1275, EN 13624, EN 13727, EN 14561, EN 14562, Přípravky registrované u VAH / DGHM.





Kompatibilita



Alginát
A-silikon
K-silikon
Polysulfid
Polyether
Litina
Polyethylen
Polytetrafluoethylen
Polypropylen
Hliník

Kompatibilní.
Kompatibilní.
Kompatibilní.
Kompatibilní.
Kompatibilní.
Kompatibilní.
Kompatibilní.
Kompatibilní.
Kompatibilní.
Nekompatibilní.

Nebezpečí



H302 Při požití zdraví škodlivý. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky. P280 Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv a ochranné brýle. P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě odstraňte/svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je možné je snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s příslušnými pravidly.



100 g obsahuje



30.0 g benzalkoniumchlorid,
povrchově aktivní látky, prostředky
posilující čisticí efekt, pomocné prostředky

Fyzikální vlastnosti



Skupenství: Čirá, slabě viskózní kapalina
Barva: Světle žlutý
Vůně: Aromatická
Hodnota pH: 10.5-12.5
Doba použitelnosti: 36 měsíců (neotevřený obal) 7 dny (použitý pracovní roztok)

Dodací listy



1 l lahev s odměrkou

Váš distributor



 Schafterová

SCHAFFEROVÁ spol. s r. o.
Andelská 29
77900 Olomouc
Česká republika
Telefon: +420 585 757 200
Fax: +420 585 757 209
info@schafterova.cz
www.schafterova.cz
www.facebook.com/schafterova

CE
1250