



# ULTRACLEAN-3

**Výkonný ultrazvukový čistič, který odstraňuje úporné zbytky, jako jsou krev, bílkoviny nebo jiné depozity.**

- ▶ **Silný čisticí prostředek**
- ▶ **Jednoduchá aplikace**
- ▶ **Vhodný pro použití v ultrazvukovém čisticím přístroji**

ULTRACLEAN-3 je účinný koncentrát pro čištění chirurgických a stomatologických nástrojů v ultrazvukové lázni. Tento produkt má díky svým alkalickým čisticím složkám dobrou schopnost rozpouštět krev a bílkoviny a odstraňuje i zatvrdlé zbytky jako sádku nebo cement.



Vyhovuje EN 1040, EN 1275.

## Předmět použití



- ▶ Pro čištění chirurgických a dentálních nástrojů, včetně skalpelů, kleští, lžic, svorek, škrabek, mikronástrojů, lopatek, pilníků, kyret a sond v ultrazvukovém čisticím přístroji
- ▶ Nevhodné pro čištění barevně označených nástrojů a nástrojů, které jsou plně nebo částečně vyrobeny z přírodních štětín, nylonu nebo hliníku




## Použití



Pro čištění nástrojů použijte vodný roztok podle dávkování. Pro odměření přesného koncentračního množství použijte spodní značku (20 ml), případně horní značku (40 ml) uvnitř víčka. Spusťte 30 minutový cyklus v ultrazvukové čističce a potom důkladně opláchněte vodou. V závislosti na stupni znečištění vyměňujte roztok dvakrát až třikrát týdně. Doporučujeme denní výměnu lázně podle stupně znečištění. Roztok může být užíván maximálně po dobu 7 dnů. Není určeno pro přírodní štětiny, nylon, hliníkové díly a nástroje s barevným kódováním.

## Dávkování

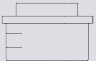

	 Koncentrát	+	 Voda		 Čas
5%	50 ml	+	950 ml		30 min





## Kompatibilita



Polyethylen  
 Polypropylen  
 Polytetrafluoethylen  
 Litina  
 Hliník

Kompatibilní.  
 Kompatibilní.  
 Kompatibilní.  
 Kompatibilní.  
 Nekompatibilní.

## Nebezpečí



H290 Může být korozivní pro kovy. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. P260 Nevdechujte prach nebo mlhu. P280 Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv a ochranné brýle. P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě odstraňte/svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je možné je snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s příslušnými pravidly.



## 100 g obsahuje



16 g hydroxid draselný,  
 komplexotvorné činidlo, speciální  
 povrchově aktivní látky

## Fyzikální vlastnosti



Skupenství: Čirá, neviskózní kapalina  
 Barva: Světle žlutý  
 Vůně: Aromatická  
 Hodnota pH: 14.0  
 Doba použitelnosti: 60 měsíců (neotevřený obal) 7 dny (použitý pracovní roztok)

## Dodací listy



1 l lahev s odměrkou

## Váš distributor



 Schafferová

SCHAFFEROVÁ spol. s r. o.  
 Andelská 29  
 77900 Olomouc  
 Česká republika  
 Telefon: +420 585 757 200  
 Fax: +420 585 757 209  
 info@schafferova.cz  
 www.schafferova.cz  
 www.facebook.com/schafferova

CE  
 1250