

# Ultra - Etch® 35% kyselina fosforečná

## Popis :

Ultra - Etch je 35 % je fosforečný leptací gel s optimální viskozitou. Dobrá tekutost dovoluje přesné umístění včetně okluzálních štěrbin. Zároveň je však dostatečně viskózní, což zabrání jeho stékání. UltraEtch má vlastní limity hloubky leptání (průměrná hloubka je 1,9µ po 20 sekundách leptání). Toto leptadlo neobsahuje glycerín a je velmi snadné jej po leptání odstranit oplachem.

## Indikace :

Používá se k leptání skloviny a dentinu před aplikací bondovacích adheziv a umístěním kompozitní výplně nebo zubních pečtidel.

## Návod k použití :

- Pro stříkačky 1,2
  - Odstraňte uzávěr Luer cap.
  - Pevně připevněte vybranou kanylu (Blue Micro® nebo Inspiral Brush®)
  - Před intraorální aplikací ověřte průtok leptadla.
  - Před aplikací ověřte barvu a konzistenci produktu. Nejprve se může vytlačit ze stříkačky malé množství čiré tekutiny. Jedná se o běžný jev.
- Pro stříkačky IndiSpense (Obrázek 1 a 2)
  - Odstraňte uzávěr Luer cap ze stříkačky IndiSpense.
  - Připevněte 1,2 stříkačku na koncovku samec u stříkačky IndiSpense.
  - Stlačte píst IndiSpense a veďte stříkačku 1,2ml k požadovanému naplnění.
  - Oddělte stříkačky a znovu uzavřete stříkačku IndiSpense uzávěrem Luer cap.
  - Pevně připevněte pracovní kanylu (Blue Micro® nebo Inspiral Brush®) na 1,2ml stříkačku.
- Návod pro přímou aplikaci
  - Izolujte zub (zuby)
  - Použijte pemzu, disk nebo diamat na neseříznutou sklovinu.
  - Opláchněte a vysušte připravenou oblast.
  - Před intraorální aplikací ověřte průtok leptadla.
  - Aplikujte leptadlo na sklovinu nebo dentin (20 sekund)
  - Pečlivě omyjte, vysušte a pokračujte podle instrukcí výrobce adheziva.
- Čištění náhrad kyselinou fosforečnou
  - Aplikujte leptadlo na vnitřek porcelánové fazety nebo korunky po dobu 5-10 sekund.
  - Opláchněte a vysušte.


## Opatření a varování:

- Před použitím pečlivě čtěte instrukce.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Pokud se produkt dostane do kontaktu s měkkými tkáněmi, OKAMŽITĚ omyjte oblast velkým množstvím vody.
- Při použití leptadla v oblasti blízko pulpy použijte ochrannou bázi.
- Mezi použitím stříkačku znovu uzavřete, desinfikujte a oťřete dezinfekcí určenou pro lékařské pomůcky.
- Pokud použijte kryt stříkačky, odstraňte kanylu, znovu uzavřete a odložte kryt.
- Kanylu a prázdnou stříkačku řádně zlikvidujte.
- Před intraorální aplikací ověřte průtok všech stříkaček. Cítíte-li odpor, vyměňte kanylu a zkontrolujte. Používejte pouze doporučené kanyly. Nepoužívejte kanyly znovu, abyste zabránili kros-kontaminaci.
- Uchovávejte při pokojové teplotě.
- Nepoužívejte po datu expirace uvedeném na obalu.

POZNÁMKA: Bezpečnostní list a další informace o přípravku Ultra-Etch najdete na [www.ultradent.com](http://www.ultradent.com).



Obrázek 1 a 2: Stříkačka 1,2ml je pevně našroubována na stříkačku IndiSpense. Zatímco popíráte píst jednorázové stříkačky nedominantní rukou, stlačte píst IndiSpense a naplňte jednorázovou stříkačku do požadované úrovně.

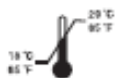

uchovávat v chladu



recyklovatelný



žiravina



spotřebujte do data



pouze pro profesionální použití



nepoužívejte opakovaně – zabraňte křížové kontaminaci




čtěte návod k použití



Stupnice rizika:

4 – velmi vážné 3 – vážné 2 – střední 1-mírné 0 – minimální

Stříkačky Ultradent mají vyraženo datum expirace skládající se z 1 písmena a 3 číslic na boku stříkačky. Písmeno značí výrobní šarži, 3 číslice znamenají datum expirace: první 2 číslice = měsíc, třetí číslice = poslední číslice roku.

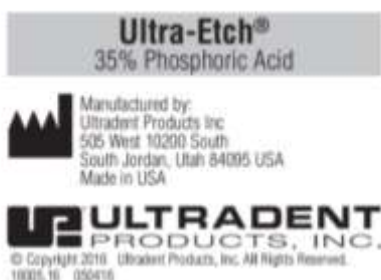

For SDS and additional information about using Ultra-Etch, please go to [www.ultradent.com](http://www.ultradent.com)

U.S. federal law restricts the sale of this device by or on the order of a dentist.

Rev. 2 - 2017