

OpalDam® Green/ OpalDam® Gingivální pryskyřičná bariéra

Popis a indikace:

OpalDam® a OpalDam® Green jsou jedinečné, světlo odrážející, pasivně-adhezivní (těsnící), světlem tuhnoucí pryskyřice.

Jejich metakrylátová báze je navržena tak, aby dosahovaly adekvátní pevnosti při vytvoření ochranné gingivální bariéry, ale aby se snadno odstraňovaly z podsekřivin a štěrbin. Kontrastní zelená barva OpalDam® Green je dobře viditelná jak na gingivě, tak i na zubech a umožňuje lepší a účinnější pokrytí.

Izolace:

1. Odstraňte uzávěr luer lock a bezpečně nasadte jednorázovou kanylu na stříkačku OpalDam / OpalDam Green.
2. Nasadte plastový rozvěrač tváří a rtů. Celý chrup kompletně opláchněte a osušte vzduchem, pozornost věnujte zejména gingivální třetině.

Poznámka: Při izolaci mandibulárního oblouku zabraňte průtoku slin štěrbinami mezi předními zuby - použijte odsávačku a buničínové válečky v sublinguální oblasti. Vytlačte OpalDam Green přes štěrbinu na patrové hrbolky a /nebo na okolní přilehlou gingivu. Polymerujte lampou 20 sekund skenujícím pohybem.

3. Vytlačte pryskyřici OpalDam / OpalDam Green tak, abyste nanесли proužek 4-6mm silný v tloušťce 1,5-2mm na gingivu. Přesáhněte přibližně 0,5mm na sklovinu (obr. 1). Protáhněte pryskyřici za poslední zub, který bude bělen. Pokud se vyskytují otevřené štěrbinu, vytlačte pryskyřici přes ně na linguální povrch tak, abyste úplně tyto mezery zaplnili. Tímto ochráníte interdentální papily a linguální gingivální tkáň. Pryskyřičné ucpávky skrz gingivální štěrbinu zvyšují retenci bariéry z OpalDam / OpalDam Green.
4. Po nanesení pryskyřičné bariéry polymerujte kvalitní polymerační lampou po dobu 20 sekund skenovacím pohybem (obr. 2)



obr. 1



obr.2

Čištění:

1. Po pečlivém odsátí bělicího gelu opláchněte zuby vodní/ vzduchovou pistolí a odsajte. Nadzvedněte bariéru OpalDam / OpalDam Green z povrchu pomocí sondy nebo jiného nástroje. Celá bariéra nebo velké části se obvykle pozvednou najednou (obr.3).
2. Odstraňte OpalDam / OpalDam Green interproximálně pomocí sondy a/ nebo dentální nitě. Opláchněte interproximálně silným proudem vody/vzduchu.



obr.3

Upozornění:

1. Pouze pro profesionální použití
2. Před započítím ošetření si přečtete návod k použití, upozornění a bezpečnostní list. Používejte pouze tak, jak je nařízeno výrobcem.
3. Uchovávejte mimo dosah dětí.
4. Nepoužívejte OpalDam / OpalDam Green u pacientů se známou citlivostí na pryskyřice, zvláště metakryláty. Jestliže se objeví dermatitida, vyrážka nebo jakákoli jiná alergická reakce, vypláchněte oblast množstvím vody a předejte pacienta lékaři.
5. Materiál není určen k injikování.
6. Výrobky uchovávejte mimo dosah tepla a/ nebo slunečního světla.
7. Před intraorálním použitím zkontrolujte průtok materiálu kanylou na neutrálním povrchu (tj. míchací podložce).
Jestliže cítíte odpor, NEPOKRAČUJTE. Nasaďte novou kanylu a před použitím na pacientovi zkuste průtok znovu.
8. Před použitím tohoto výrobku by mělo být potvrzeno zdraví gingiválních a orálních tkání.
9. Jestliže se podél okrajů OpalDam / OpalDam Green opakovaně tvoří bubliny, odsajte a opláchněte gel a zkontrolujte těsnost bariéry, lehce oblast vysušte a znovu naneste OpalDam Green. Jestliže problém přetrvává, bariéru úplně odstraňte a naneste znovu.
10. Doporučujeme používat obaly na stříkačky Ultradent® Syringe Covers jako ochrannou bariéru bránící vzájemné kontaminaci.
11. Při polymeraci pryskyřice OpalDam / OpalDam Green používejte pouze kvalitní polymerační lampu..
12. Kanyly a stříkačky správně zlikvidujte




šarže



katalogové číslo



pouze pro profesionální použití

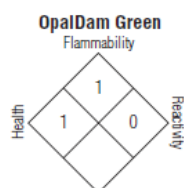

RIZIKO:
4-velmi vysoké
3-vysoké
2-střední
1-nízké
0-minimální



čtete návod k použití



nepoužívejte opakovaně – zabraňte křížové kontaminaci




riziko pro zdraví



spotřebujte do data




chraňte před slunečním světlem a teplem

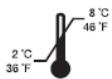

uchovávat v chladu



recyklovatelný

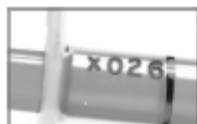

X026 = LOT
X026 = MM
X026 = YYYY

stříkačky Ultradent mají vyražené datum expirace na boku stříkačky. Sestává z 1 písmena a 3 číslic. Písmeno je šarže pro identifikaci výrobce, číslice jsou expirace.. První 2 číslice jsou měsíc, 3. číslice rok.

For product SDS please see our
website: www.ultradent.com



Ultradent Products GmbH
Am Westhove Berg 30
51149 Cologne
Germany

OpalDam®Green / OpalDam®
Gingival Resin Barrier



Manufactured by:
Ultradent Products Inc
505 West 10200 South
South Jordan, Utah 84095 USA
Made in USA

ULTRADENT
PRODUCTS, INC.

© Copyright 2011 Ultradent Products, Inc. All Rights Reserved.
63063.6 032415

Rev.3_11_2017