

ViscoStat® Clear

Popis:

ViscoStat® Clear je gel s 25 % chloridu hlinitého ve viskózním vodném vehikulu. ViscoStat® Clear nezanechává žádné stopy nebo skvrny a je proto ideální pro použití v estetické zóně.

Indikace:

ViscoStat Clear je určen pro retrakci sulku před snímáním otisků a pro kontrolu krvácení a mírného krvácení dásní v obnovujícím a operačním zubním lékařství. Je určen k použití s gingiválním retrakčním vláknem a/nebo s kanylou Dento-Infuso. Roztok usnadňuje zasunutí vlákna do sulku.

Návod k použití – obecné:

1. Pro 1,2ml stříkačku
 - a. Odstraňte uzávěr.
 - b. Bezpečně našroubujte pracovní kanylu (Metal Dento-Infusor).
 - c. Před intraorální aplikací ověřte průtok.
2. Pro stříkačku IndiSpense
 - a. Odstraňte uzávěr ze stříkačky IndiSpense.
 - b. Připevněte 1,2ml stříkačku na mužský konec stříkačky IndiSpense.
 - c. Uvolněte píst IndiSpense, zatímco plníte 1,2ml stříkačku do požadovaného množství.
 - d. Oddělte stříkačky a znovu IndiSpense stříkačku uzavřete.
 - e. Bezpečně připevněte pracovní kanylu (Metal Dento-Infusor).
 - f. Před intraorální aplikací ověřte průtok.
3. Pomocí dlaňového úchopu pomalu vytlačujte roztok, zatímco jej vtíráte do krvácející tkáně.

Poznámka: Abyste zabránili kros-kontaminaci, používejte pro další materiál nové stříkačky a kanyly.

Poznámka: Doporučený čas kontaktu pro ViscoStat Clear je 1-3 minuty.

Návod k použití – otisky:

1. Dodržujte kroky části „obecné“ výše.
2. Vetřete vytlačený roztok okolo celého okolí preparace do krvácejícího povrchu tkáně, aby bylo krvácení pod kontrolou.
3. Když docílíte homostáze, omyjte preparaci vodou/vzduchem. Hemostázi zkontrolujte. Pokud krvácení pokračuje, opakujte na krvácející oblast krok 2 výše. Opět zkontrolujte místo omytím vodou/vzduchem dokud se krvácení nezastaví.
4. Proveďte retrakci gingivy zavedením vhodného vlákna Ultrapak nebo jiného retrakčního vlákna do sulku. Pro optimální retrakci a hemostázi dejte malé množství ViscoStat Clear do skleněného kalíšku a vlákno před zavedením namočte.
5. Čekejte 1-3 minuty před vyjmutím vlákna.
6. Vyjměte vlákno, opláchněte vodou/vzduchem, zkontrolujte stav hemostáze a sejměte otisk.

Návod k použití – přímé a nepřímé adhezivní výplně:

1. Následujte kroky části „Obecné“ výše.
2. Jemně třete celou oblast okolo preparace a vytlačujte roztok do krvácejícího povrchu tkáně, aby krvácení bylo pod kontrolou.
3. Když docílíte hemostáze, omyjte preparaci vodou/vzduchem. Zkontrolujte stav hemostáze. Pokud krvácení pokračuje, opakujte na krvácející oblast krok 2 výše. Opět zkontrolujte místo omytím vodou/vzduchem dokud se krvácení nezastaví.
4. Namočte Ultrapak nebo jiné retrakční vlákno do roztoku ViscoStat Clear.
5. Jemně zaveďte vlákno vhodné velikosti do sulku.

6. Pečlivě očistěte preparaci a okolní tkáň vodou/vzduchem a zkontrolujte stav hemostáze a sulkulární tekutinu.
7. Očistěte povrch preparace pemzou nebo pomocí Ultradent Consepsis Scrub.
8. Čekejte 1-3 minuty a odstraňte retrakční vlákno. Používáte-li pro retrakci gingivy vlákno nenamočené do roztoku, můžete jej během zákroku ponechat na místě, aby chránilo měkké tkáně, nebo může být odstraněno.
9. Znovu opláchněte vodou/vzduchem a vysušte.
10. Aplikujte bondovací systém a náhradu podle instrukcí výrobce.

POZNÁMKA O ČIŠTĚNÍ: Zub a okolní tkáň musí být důkladně očištěny od zbytků hemostatik nebo sraženiny na zubním povrchu, abyste zabránili kontaminaci substrátu dentinu a/nebo skloviny. V opačném případě může dojít k znehodnocení bondu nebo pečetění kvůli mikroprosakování. Povrch může být také kontaminován dočasnými cementy, což způsobuje mikroprosakování a znehodnocení bondu.

Opatření a varování:

1. Určeno pouze pro odborníky.
 2. Pozorně čtěte před použitím všechny instrukce, opatření a varování.
 3. Nepoužívejte u pacientů se známou alergií na chlorid hlinitý nebo s přecitlivělostí na chemické látky.
 4. ViscoStat Clear, dočasný cement, muciny a krev snižují kvalitu adheze a polymerace/usazení pryskyřice a způsobují mikroprosakování pod náhradou. Preparace musí být pečlivě vyčištěná vodou/vzduchem a/nebo pemzou nebo Consepsis scrub.
 5. ViscoStat Clear musí být důkladně omyt vodou/vzduchem z preparace, aby se zabránilo reakci s polyetherovými materiály a tím i porušení povrchu na otisku.
 6. Používáte-li samoleptací bondovací systém, povrch zubu/preparace musí být očištěn pemzou nebo pomocí Consepsis Scrub a důkladně před aplikací omyt. Není to nutné, pokud používáte bondovací systém s fosforečným leptadlem nebo pokud používáte běžný skloionomerní, zink-fosfátový nebo podobný cement.
 7. Nekombinujte s jinými hemostatiky nebo chemickými prostředky, aniž byste nejprve omyli zub a okolní tkáň.
 8. Viscostat Clear je určen pro intraorální použití.
 9. Před intraorálním použitím ověřte průtok ze všech stříkaček. Zaznamenáte-li odpor, vyměňte kanylu a znovu zkontrolujte.
 10. Používejte pouze doporučené kanyly.
 11. Použité kanyly a prázdné stříkačky řádně zlikvidujte.
 12. Abyste zabránili kros-kontaminaci, nepoužívejte kanyly opakovaně.
 13. Nepoužívejte po datu expirace uvedeném na obalu.
 14. Všechny kanyly a prázdné stříkačky jsou jednorázové, aby nedošlo ke kros-kontaminaci. Naplňte prázdné stříkačky potřebným množstvím materiálu pro jednotlivého pacienta. Po použití stříkačky zlikvidujte.
 15. Předplněné stříkačky lze používat opakovaně. Během použití musí být chráněny pomocí Syringe Covers. Po použití Syringe Cover odstraňte a zlikvidujte společně s kanylou stříkačky. Stříkačku znovu uzavřete a dezinfikujte přípravkem určeným pro dezinfekci lékařských pomůcek, který se neváže proteiny.
 16. Zabraňte polknutí produktu.
 17. Chraňte produkt před přímým slunečním teplem/světlem.
 18. Při manipulaci s ViscoStat Clear používejte ochranné oblečení a oční štít.
 19. Udržujte z dosahu dětí.
 20. ViscoStat Clear neobsahuje epinefrin.
- Poznámka: Bezpečnostní list a další informace o použití produktu ViscoStat Clear naleznete na www.ultradent.com.

Ne pro injekce.


Určeno pro stomatology

Po použití zlikvidujte.

Pouze pro odborníky.
Udržujte z dosahu dětí.



recyklovatelný

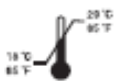

uchovávat v chladu



pouze pro profesionální použití



žíravina



šarže



spotřebujte do data



zdravotní riziko



čtěte návod k použití



katalogové číslo



nepoužívejte opakovaně – zabraňte křížové

Stříkačky Ultradent mají vyraženo datum expirace skládající se z 1 písmena a 3 číslic na boku stříkačky
Písmeno značí výrobní šarži, 3 číslice znamenají datum expirace: první 2 číslice = měsíc, třetí číslice = poslední číslice roku.



Ultradent Products GmbH
Am Westhoyer Berg 30
51149 Cologne
Germany

ViscoStat® Clear 25% Aluminum Chloride



Manufactured by:
Ultradent Products Inc
505 West 10200 South
South Jordan, Utah 84095 USA
Made in USA

ULTRADENT
PRODUCTS, INC.

© Copyright 2013 Ultradent Products, Inc. All Rights Reserved.

71278.11 032315



X026 = LOT

X026 = MM

X026 = RRRR