

PermaFlo® Pink Flow Kompozit

Popis a Indikace:

PermaFlo Pink je světlem tuhnoucí, rentgenkontrastní flow kompozit na bázi metakrylátu. PermaFlo obsahuje částice o průměrné velikosti 1 µm s úzkým rozpětím horní meze jejich velikostní distribuce. Je thixotropní, je plněný ze 68 hmotnostních % .

PermaFlo Pink se používá k zamaskování gingivální recese, kde je exponovaný kořen zubu.

Postup:

1. Ze stříkačky sejměte uzávěr a nasadte na ni jednorázovou kanylku Micro 20G.
2. Izolujte preparaci retrakčním vláknem nebo kofrdamem pro zajištění suchého pracovního pole a kontrolu sulkulárních tekutin.
3. Leptejte po dobu 20 sekund.
4. Aplikujte dentinovou bondovací složku, doporučujeme PQ1. Ztenčete vzduchem a polymerujte po dobu 20 sekund.
5. Aplikujte první vrstvu PermaFlo Pink o tloušťce 0,5 – 1,0 mm a zpolymerujte. Následujte vrstvení ve 2mm vrstvách dle potřeby. Každou vrstvu polymerujte po dobu 20 sekund viz. obr.1.
6. Výplň upravte vhodnými leštícími nástroji a vyleštěte abrazivními páskami, leštícími kalíšky, kotouči nebo disky. Pro dosažení lesku doporučujeme leštící systém Jiffy®a na závěr Jiffy HiShine, viz. obr.2.



Fig. 1



Fig. 2

Upozornění:

1. Částečně zpolymerovaný materiál bude mít nedostatečné fyzikální vlastnosti, včetně pevnosti, odolnosti proti otěru, retence, kvality okrajového uzávěru a barevné stability.
2. Neúplně polymerizovaný materiál může také způsobit podráždění pulpy. Používejte jen kvalitní polymerační lampy, které pravidelně je kontrolujte světloměrem.
3. Kyslíková inhibiční vrstva by se během vrstvení neměla odstraňovat nebo narušovat, protože zlepšuje vazbu k následující vrstvě.
4. Jakákoliv pryskyřice může senzibilizovat kůži nebo u již senzibilizovaného jedince způsobovat alergickou reakci. Oblast kůže zasaženou pryskyřicí proto důkladně opláchněte. Pokud se objeví dermatitis, vyrážka nebo jakákoliv jiná alergická reakce, musí se pacient odeslat k praktickému lékaři.
5. Po použití se stříkačky opět uzavírají, aby se předešlo polymerizaci (protože se kompozitní pryskyřice aktivují světlem).

Obecná opatření:

1. Určeno pouze pro odborníky.
2. Před začátkem zákroku čtěte instrukce, opatření, bezpečnostní list. Používejte pouze dle pokynů.
3. Chraňte produkt před slunečním světlem/teplem.
4. Zabraňte kontaktu pryskyřice s kůží.
5. Izolujte silné chemikálie na oblast zákroku.
6. Ujistěte se, že pacient netrpí žádnou známou alergií na používané materiály.
7. Před intraorálním použitím ověřte průtok materiálu ze stříkačky.
8. Nikdy nestlačujte píst stříkačky násilím.
9. Používejte kryty Ultradent® Syringe Covers a/nebo mezi jednotlivými pacienty čistěte a dezinfikujte stříkačky.
10. Na všechny světlem tuhnoucí materiály používejte běžné polymerační lampy



Obrázky podle pořadí:

1. Izolujte preparaci retrakčním vláknem nebo kofferdamem, leptejte 20 sekund.
2. Aplikujte větší vrstvu PQ1, ztenčete vzduchem, polymerujte 20 sekund.
3. Adaptujte PermaFlo Pink do požadované kontury. Ověřte, že nejsou přítomné převisy okrajů.
4. Výplň upravte vhodnými leštícími nástroji a vyleštěte abrazivními páskami, leštícími kalíšky, kotouči nebo disky Jiffy HiShine.

R_X

pouze pro profesionální použití



skladujte v pokojové teplotě




spotřebujte do data



zdravotní riziko



čtěte návod k použití

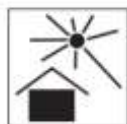

Uchovávejte produkt mimo teplo a světlo



Výrobce

REF


katalogové číslo

LOT

šarže



recyklovatelný

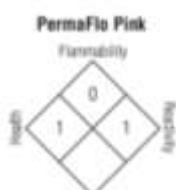

Stupnice rizika:

4 – velmi vážné 3 – vážné 2 – střední 1-mírné 0 – minimální

Stříkačky Ultradent mají vyraženo datum expirace skládající se z 1 písmena a 3 číslic na boku stříkačky. Písmeno značí výrobní šarži, 3 číslice znamenají datum expirace: první 2 číslice = měsíc, třetí číslice = poslední číslice roku.

PermaFlo® Pink
Flowable Composite



Manufactured by:
Ultradent Products Inc
505 West 10200 South
South Jordan, Utah 84095 USA
Made in USA

CE **EC REP**
0044

Ultradent Products GmbH
Am Westhoyer Berg 30
51149 Cologne Germany

ULTRADENT
PRODUCTS, INC.

© Copyright 2016 Ultradent Products, Inc. All Rights Reserved.

94801-U-7 092716