

## PermaFlo® Purple

Kompozit jako indikátor anatomie

### Popis:

Permaflo Purple je světlem tuhnoucí, rentgenkontrastní flow kompozit na bázi metakrylátu. Je tixotropní, plněný z 68%. PermaFlo obsahuje plnivo s průměrnou velikostí částic 1 µm.

### Indikace:

Jako provizorní uzávěr po endodontickém ošetření a pro snadné rozpoznání dna dřeňové dutiny a/nebo místa vchodu do kořenového kanálku.

### Návod k použití:

1. Musí být dokončeno zaplnění kořenového kanálku. Očistěte dno dřeňové dutiny bavlnou a isopropyl alkoholem a vysušte.
2. Naneste dentinové adhezivum na celou preparaci podle instrukcí výrobce.
3. Odejměte uzávěr a připevněte kanylu (Black Mini nebo Micro 20)
4. Před intraorální aplikací ověřte průtok.
5. Na dno dřeňové dutiny nebo přes každý otvor kanálku naneste PermaFlo Purple v síle 1-2 mm.
6. Osviňte polymerační lampou VALO® LED Curing Light on Standard Power po dobu 10 vteřin. (Lampou s výkonem <600mw/cm2 polymerujte po dobu 20 vteřin. Lampou s výkonem >600mw/cm2 polymerujte 10 vteřin.
7. Uzavřete provizorní nebo konečnou výplň.

### Upozornění a varování:

1. Chemikálie se může v kanyle po několika hodinách usadit. Abyste zabránili ucpání, vždy kanylu vyjměte a znovu uzavřete uzávěrem Luer Lock mezi každým použitím. Vždy před intraorální aplikací zkontrolujte průtok materiálu. Cítíte-li při stlačení odpor, vyjměte kanylu a zkontrolujte.
2. Před použitím pozorně čtěte všechny instrukce.
3. Používejte doporučené kanyly.
4. PermaFlo Purple uchovávejte v lednici mimo dobu práce.
5. Jakákoliv pryskyřice může senzibilizovat kůži nebo u již senzibilizovaného jedince způsobovat alergickou reakci. Oblast kůže zasaženou pryskyřicí proto důkladně opláchněte. Pokud se objeví dermatitis, vyrážka nebo jakákoliv jiná alergická reakce, musí se pacient odeslat k praktickému lékaři.
6. Kanyly a prázdné stříkačky pečlivě zlikvidujte.
7. Stříkačky znovu uzavírejte uzávěrem Luer Lock.
8. Abyste zabránili kros-kontaminaci, desinfikujte a čistěte stříkačky pomocí desinfekčního přípravku určeného pro lékařské pomůcky mezi jednotlivými pacienty nebo používejte jednorázové kryty na stříkačky.
9. Kanyly jsou určeny k jednorázovému použití. Nepoužívejte je znovu, aby nedošlo ke kros-kontaminaci.
10. Udržujte mimo dosah dětí.
11. Nepoužívejte po datu expirace uvedeném na stříkačkách.
12. Určeno pouze pro profesionální použití.



čtěte návod k použití

LOT

šarže



skladujte v pokojové teplotě

R<sub>X</sub>

pouze pro profesionální použití



nepoužívejte opakovaně – zabraňte křížové kontaminaci



spotřebujte do data




katalogové číslo



recyklovatelný



dráždivý

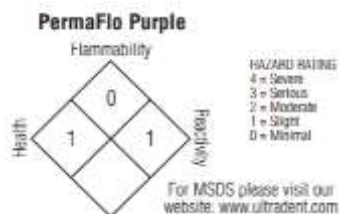

Stupnice rizika:

4 – velmi vážné    3 – vážné    2 – střední    1-mírné    0 - minimální

Stříkačky Ultradent mají vyraženo datum expirace skládající se z 1 písmena a 3 číslic na boku stříkačky. Písmeno značí výrobní šarži, 3 číslice znamenají datum expirace: první 2 číslice = měsíc, třetí číslice = poslední číslice roku.

CE (EC REP) UP Dental GmbH  
Am Westhoyer Berg 30  
51149 Cologne Germany

**PermaFlo® Purple**  
Anatomical Indicating Composite

Manufactured by:  
Ultradent Products Inc  
505 West 10200 South  
South Jordan, Utah 84095 USA  
Made in USA

**ULTRADENT**  
PRODUCTS, INC.

© Copyright 2011 Ultradent Products, Inc. All Rights Reserved. 94800-US 021914

Pokud nepoužíváte denně, uchovávejte v chladu.  
Uchovávejte mimo dosah dětí.