

UltraCal® XS

Pasta s hydroxidem vápenatým

Popis: UltraCal XS je radiopákní pasta s obsahem vody dodávaná ve stříkačkách s pH 12,5. Je vhodná pro endodontická ošetření. Pro předvídatelný průtok doporučujeme používat větší kanylu NaviTip 29, která umožní přímé nanesení.

Indikace: UltraCal XS je používán pro překrývání pulpy, léčbě kořenových kanálků nebo jako léčivá vložka na dobu mezi endodontickými ošetřeními.

Postup: Odejměte uzávěr UltraCal XS stříkačky a nasad'te kanylu Navi Tip. Pastu aplikujte krátce do apexu a zaplňujte pomalým pohybem směrem ven (obr. 1)



Obr. 1: Kanálek se plní pastou UltraCal XS.

Opatření:

1. Jedná se o základní materiál. Používejte opatrně a omyjte velkým množstvím vody, pokud se materiál dostane na nežádoucí plochu.
2. Kanyly jsou jednorázové.
3. Před aplikací ověřte barvu a konzistenci produktu tak, že vytlačíte malé množství na míchací podložku nebo gázu. Odstraňte všechnu čirou tekutinu, kterou vytlačíte.
4. Aplikujte s kanylou Navi Tip, minimálně 2mm od apexu. Kanyla musí být v kanálku vždy volně. Neaplikujte plastovými s kanylami, které budou v kanálku těsné (například CapillaryTM kanyly).
5. Předplněné stříkačky jsou použitelné k opakovanému naplnění. Před aplikacemi je vždy vyčistěte a vydesinfikujte.
6. Velmi doporučujeme použít Ultradent® Syringe Covers pečetěné pomocí Impulse Sealer k vytvoření ochranné bariéry před kros-kontaminací.


Obecná upozornění:

1. Určeno pouze pro odborníky.
2. Před zákrokem čtěte instrukce, varování, opatření a bezpečnostní list. Bezpečnostní list a další informace najdete na www.ultradent.com.
3. Chraňte produkt před teplem a slunečním světlem.
4. Vyhněte se kontaktu pryskyřice s pokožkou.
5. Izolujte silné chemikálie pouze pro oblast zákroku.
6. Ujistěte se, že pacient netrpí žádnou známou alergií na používané materiály.
7. Před intraorálním použitím ověřte průtok materiálu ze stříkačky.
8. Nestlačujte písty stříkačky silou.
9. Používejte Ultradent® Syringe Covers a/nebo mezi jednotlivými pacienty stříkačky čistěte a desinfikujte.

10. Používejte standardní polymerační lampy se všemi materiály vhodnými k polymerování lampou.



Skladujte při pokojové teplotě

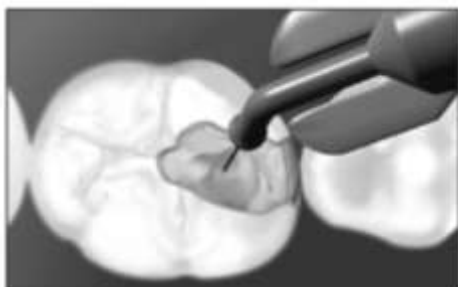

Naplňujte do kanálku pohybem směrem ven maximálně do 2mm od apexu.



Kanálek před zákrokem vlevo, 5 měsíců po aplikaci UltraCal XS vpravo. UltraCal je stále v kanálkách.

Po použití zlikvidujte.
Určeno pro dentisty.
Není pro injekce.

R_x

pouze pro profesionální použití




recyklovatelný



žíravina



nepoužívejte opakovaně – zabraňte křížové kontaminaci

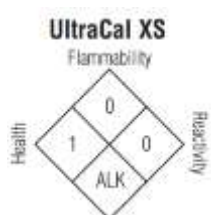

Stupnice rizika:

4 – velmi vážné 3 – vážné 2 – střední 1 – mírné 0 – minimální

CE EC REP 0044 Ultradent Products GmbH
Am Westhöver Berg 30
51149 Cologne
Germany

UltraCal® XS
Calcium Hydroxide Paste



Manufactured by:
Ultradent Products Inc.
505 West 10200 South
South Jordan, Utah 84095 USA
Made in USA

For product SDS please see our
website: www.ultradent.com

ULTRADENT
PRODUCTS, INC.
© Copyright 2011 Ultradent Products, Inc. All Rights Reserved.
41708-U.7 102015