

## Composite Wetting Resin

### Popis a indikace:

Composite Wetting Resin je zvlhčující pryskyřice, která radioopákní, světlem tuhne a je ze 45% naplněná. Může být použita během nanášení kompozita, pokud se kompozit stal během vrstvení sušší, nebo při odstranění nebo narušení kyslíkové inhibiční vrstvy. Composite Wetting Resin pomáhá zlepšit klouzání nástroje během vrstvení, modelování a konturování.

### Postup:

1. Odstraňte uzávěr Luer lock a nasadte na stříkačku kanylu Inspiral Brush.
2. Podle potřeby aplikujte tenkou vrstvu na zpolymerovaný kompozitní povrch. Ztenčete vzduchem nebo odsajte (přebytky pryskyřice odsajte kanylou Endo-Eze® 18-20ga a Luer Vacuum adaptérem).
3. Pokud používáte Composite Wetting Resin k zajištění klouzání nástroje, aplikujte malé množství na nástroj nebo povrch měkkého kompozita.

### Upozornění:

1. Jakákoliv pryskyřice může způsobit přecitlivělost nebo alergickou reakci u již citlivých osob. V tomto případě opláchněte exponovanou plochu a kompletně odstraňte materiál. Jestliže se objeví dermatitis, vyrážka nebo jiné alergické reakce, navštivte lékaře.
2. V případě intraorální aplikace, nikdy netlačte silou na píst stříkačky. Pokud je kanyla obtížně průchodná, vyměňte kanylu a než budete pokračovat, ověřte průtok.
3. S každým konkrétním materiálem používejte pouze doporučené kanyly. Kanyly jsou jednorázové.
4. Doporučujeme použít obaly na stříkačky Ultradent® jako ochrannou bariéru k prevenci křížové kontaminace.



Podle potřeby aplikujte tenkou vrstvu na zpolymerovaný kompozitní povrch. Ztenčete vzduchem nebo odsajte (přebytky pryskyřice odsajte kanylou Endo-Eze® 18-20ga a Luer Vacuum adaptérem)



Pokud používáte Composite Wetting Resin k zajištění klouzání nástroje, aplikujte malé množství na nástroj nebo povrch měkkého kompozita.



kanyla Inspiral Brush

## Všeobecná upozornění:

1. Pouze pro profesionální použití
2. Před započatím ošetření si projít návod, upozornění a bezpečnostní list. Používat pouze podle pokynů.
3. Uchovávat produkt mimo dosah tepla a slunečního záření.
4. Zabránit pokožce expozici pryskyřicím.
5. Izolovat silné chemikálie od oblasti ošetření.
6. Ujistit se, že pacient netrpí alergiemi na ošetřující materiály.
7. Vyzkoušet průtok materiálu ze stříkačky kanylou před intraorálním použitím
8. Nikdy netlačit silou na píst stříkačky.
9. Používat obaly na stříkačky Ultradent® a/ nebo čistěte stříkačky mezi pacienty
10. Pro všechny světlem polymerující/ aktivované materiály používejte standardní polymerační lampu.



spotřebujte do data



nepoužívejte opakovaně – zabraňte křížové kontaminaci




šarže



pouze pro profesionální použití



zdravotní riziko

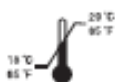

skladujte v chladu



výrobce



čtěte návod k použití



katalogové číslo



uchovávat mimo dosah tepla a slunečního záření



Ultradent Products GmbH  
Am Westhoyer Berg 30  
51149 Cologne  
Germany

### Composite Wetting Resin



Manufactured by:  
Ultradent Products, Inc.  
505 West 10200 South  
South Jordan, Utah 84095 USA  
Made in USA

For product SDS please see our  
website: [www.ultradent.com](http://www.ultradent.com)  
1-800-552-9512; 801-572-4200

**ULTRADENT**  
PRODUCTS, INC.

© Copyright 2016 Ultradent Products, Inc. All Rights Reserved.  
28887.7 080816

### Composite Wetting Resin



Riziko:  
4-závažné  
3-vážné  
2-střední  
1-nízké  
0-minimální