

Enamelast®

Fluoridový lak
s 5% NaF

Popis:

Fluoridový lak Enamelast® je 5% fluorid sodný v pryskyřičném nosiči s xylitolem jako sladidlem a s příchutí ve stříkačce 1,2ml nebo v jednorázovém blistru 0,4ml.

Indikace:

Fluoridový lak Enamelast® vytváří mechanickou okluzi dentinových tubulů při ošetření zvýšené citlivosti zubů.

Postup – aplikace z 1,2ml stříkačky:

1. Nejříve zuby důkladně očistěte kartáčkem, pryžovým leštícím kalíškem nebo setřete gázovým tampónkem.
2. Pokud aplikujete Enamelast® z 1,2 ml stříkačky, odstraňte uzávěr a nasaďte pevně aplikační kanylu SoftEZ (dodává se samostatně).
3. Před intraorálním použitím ověřte průtok materiálu kanylou mimo ústa pacienta.
POZN.: Enamelast® také můžete nanést na hřbet ruky v rukavici nebo do mističky a aplikovat štětečkem (dodává se samostatně).
4. Lehce osušte místo, které má být ošetřeno.
5. Naneste tenkou hladkou vrstvu na co nejvíce suchých povrchů - nanášejte „natíracím“ pohybem. Není třeba míchat.
POZN.:
 - Enamelast® tuhne při kontaktu s vodou nebo se slinami. Umožněte tvářím, rtům a slinám aktivovat lak na zubech nebo jemně opláchněte zuby studenou vodou. Upozorněte pacienty, aby si neolizovali zuby několik minut po nanesení – z estetických důvodů, aby lak zůstal na zubech hladký a neviditelný.
 - Pacienti by neměli zuby čistit kartáčkem, flosovat nebo žvýkat tvrdé, lepkavé a horké potraviny 4 – 6 hodin po aplikaci. Fluoridový lak Enamelast® se začne stírat při každém čištění zubů kartáčkem.

Postup – aplikace z 0,4ml blistru:

1. Nejříve zuby důkladně očistěte kartáčkem, pryžovým leštícím kalíškem nebo setřete gázovým tampónkem.
2. Otevřete blistr - odtrhněte a odstraňte víčko z fólie.
3. Lehce osušte místo, které má být ošetřeno.
4. Pomocí jednorázového štětečku naneste tenkou hladkou vrstvu na co nejvíce suchých povrchů - nanášejte „natíracím“ pohybem. Není třeba míchat.
POZN.:
 - Štěteček můžete ohnout do úhlu 90° tak, abyste získali lepší dosah.
 - Enamelast® tuhne při kontaktu s vodou nebo se slinami. Umožněte tvářím, rtům a slinám aktivovat lak na zubech nebo jemně opláchněte zuby studenou vodou. Upozorněte pacienty, aby si neolizovali zuby několik minut po nanesení – z estetických důvodů, aby lak zůstal na zubech hladký a neviditelný.
 - Pacienti by neměli zuby čistit kartáčkem, flosovat nebo žvýkat tvrdé, lepkavé a horké potraviny 4 – 6 hodin po aplikaci. Fluoridový lak Enamelast® se začne stírat při každém čištění zubů kartáčkem.

Upozornění:

1. Před použitím pečlivě čtěte návod k použití a ujistěte se, že mu rozumíte.
2. Pokud aplikujete ze stříkačky 1,2ml, nepoužívejte více než ½ obsahu stříkačky fluoridového laku na 1 pacienta a 1 aplikaci. Před intraorální aplikací ověřte průtok kanylou. Jestliže lak neprotéká kanylou nebo protéká ztuhla, vyměňte kanylu a zkuste znova. Používejte pouze doporučené kanyly.
3. Skladujte v pokojové teplotě.
4. Neodstraňujte uzávěr ze stříkačky, pokud nejste připraveni ji použít.
5. Pacienti i ošetřující personál musejí mít při aplikaci tohoto přípravku ochranné brýle.
6. Nepoužívejte u pacientů s ulcerózní gingivitidou nebo stomatitidou.
7. Nepoužívejte s jinými fluoridačními přípravky aplikovanými místně ve stejný den a počte pacienta, aby nepoužíval ústní fluoridační doplňky po následující 4 dny po ošetření.
8. Nepoužívejte u pacientů, o nichž víte, že mají citlivost na složky přípravku včetně kalafuny a pryskyřice. Při výskytu alergické reakce, dermatitidy nebo vyrážky konzultujte s lékařem.

9. Vzácně byl po extenzivní léčbě fluoridovým lakem hlášen edematózní otok a u astmatických dětí dušnost.
10. U některých pacientů se může po aplikaci objevit nevolnost. Jestliže nevolnost přetrvává, odstraňte fluoridový lak kartáčkem.
11. Aplikační kanyly a štětečky jsou na jedno použití, aby se zabránilo křížové kontaminaci.
12. Předplněné stříkačky mohou být použity opakovaně. Během použití musí být chráněny plastovým ochranným obalem na stříkačky. Po použití sundejte a vyhoďte obal spolu s aplikační kanylou. Stříkačku uzavřete Luer-Lock uzávěrem a dezinfikujte stříkačku desinfekčním přípravkem pro zdravotnické prostředky, který nemá žádný vliv na fixaci proteinů.
13. Použité stříkačky, aplikační kanyly, ochranné obaly, prázdné blistry i použité štětečky správně likvidujte.
14. Uchovávejte mimo dosah dětí.
15. Pouze pro profesionální použití.
POZN: BL a další informace ohledně použití fluoridačního laku Enamelast® a souvisejících produktů najdete na www.ultradent.com



hořlavý



čtěte návod k použití



recyklovatelný



nepoužívejte opakovaně – zabraňte křížové kontaminaci



zdravotní riziko

R_x

pouze pro profesionální použití



skladujte v pokojové teplotě

LOT

šarže



spotřebujte do data

REF

katalogové číslo

For product SDS please see our
website: www.ultradent.com
1-800-552-5512; 801-572-4200
CE **EC REP** 0044
Ultradent Products GmbH
Am Westhaver Berg 30
51149 Cologne
Germany
For immediate reorder and/or complete descriptions of
Ultradent's product line, refer to Ultradent's catalog or
call Toll Free 1-800-552-5512. Outside U.S. call (801)
572-4200 or visit www.ultradent.com.

Enamelast® Fluoride Varnish
5% Sodium Fluoride Varnish



Manufactured by:
Ultradent Products Inc.
505 West 10200 South
South Jordan, Utah 84095 USA
Made in USA

ULTRADENT
PRODUCTS, INC.

© Copyright 2016 Ultradent Products, Inc. All Rights Reserved.
1004338.1 040416