

UltraEZ®

Gel na snížení citlivosti

Popis:

UltraEZ® je unikátní lepivý a viskózní gel s obsahem 3% dusičnanu draselného a 0,11 % hm. fluoridového iontu, který trvale uvolňuje. UltraEZ je dodáván v předplněných univerzálních nosičích.

Indikace:

UltraEZ Desensitizing Gel vytváří film pro úlevu citlivým zubům, uzavírá dentinové tubuly exponovaného dentinu a další oblasti sensitive po zákrocích. Tento produkt je určen pro stomatology a aplikaci v ordinaci nebo pro domácí léčbu citlivých zubů.

Bezpečnostní list produktu najdete na www.ultradent.com.

Instrukce pro pacienta:



Formu nasad'te na zubní oblouk.



Lehce přitlačte na místo.



Vyjměte vnější formu.



Poté, co usadíte formu v ústech, jemně ji přitlačte směrem od zubů k dásním, aby gel zuby kompletně pokryl.




UltraEZ: Nechte působit 15minut až 1 hodinu jednou za den nebo dle instrukcí stomatology.

Na závěr vyjměte formu a zuby vyčistěte.

Opatření:

1. Uchovávejte produkt mimo dosah dětí.
2. Produkt NENÍ určen pro aplikaci přes noc.
3. Během použití produktu neužívejte tabákové výrobky ani nejezte.
4. Není určeno pro těhotné ženy.
5. V případě jakýchkoliv problémů přípravek přestaňte používat a kontaktujte svého stomatologa.
6. Vždy chraňte před slunečním světlem/teplem. UltraEZ může být uchováván při pokojové teplotě.
7. Pokud dojde k nechtěnému polknutí většího množství produktu, vyhledejte lékařskou pomoc a kontaktujte Toxologické informační středisko.
8. Nepoužívejte opakovaně, aby nedošlo ke kros-kontaminaci.

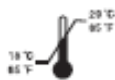

uchovávat v chladu



pouze pro profesionální použití



čtěte návod k použití



šarže



spotřebujte do data



nepoužívejte opakovaně – zabraňte křížové



Uchovávejte mimo dosah dětí



Chraňte před slunečním světlem/teplem

Imported By:
Clinician's Choice Dental Products /
Clinical Research Dental
NGA 1M6
Syringe NPN 80011364
Tray NPN 80031866




Ultradent Products GmbH
Am Westhoyer Berg 30
51149 Cologne Germany

800.552.5512 ULTRADENT.COM

 **ULTRADENT**
PRODUCTS, INC.

© Copyright 2016 Ultradent Products, Inc. All Rights Reserved.

 Manufactured by Ultradent Products, Inc. Made in USA
505 West 10200 South, South Jordan, Utah 84095 41300.19 080516