



Průvodce: fixace zirkonových náhrad - PermaFlo®DC

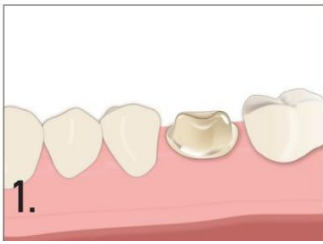

Očistěte, opláchněte a vysušte preparaci. Vyzkoušejte náhradu a ověřte, zda dobře zapadá.

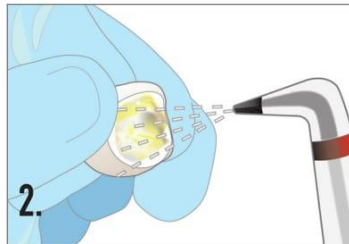

Abradujte vnitřní povrch vzduchem, opláchněte, vysušte a dejte stranou. *Poznámka: Kontaminace vnitřního povrchu náhrady vede k oslabení bondu. Udržujte oblast čistou, beze stop slin a leptadla z kyseliny fosforečné.*




Vyčistěte povrch zubu pomocí abraziva jako je Consepsis® Scrub.




Pomocí STARbrush® abrazivum očistěte, dezinfikujte a odstraňte všechny zbytkový cement. Opláchněte a vysušte vzduchem.




Leptejte 20 sekund pomocí Ultra-Etch®. Opláchněte vodou a jemně vysušte vzduchem. **VOLITELNÉ:** Aplikujte na preparaci Consepsis®.*

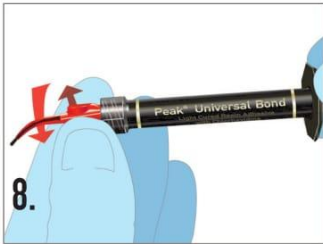

Bezpečně připevněte kanylu Inspiral® Brush na stříkačku Peak® Universal Bond. *Dostupné i v lahvičkách.*

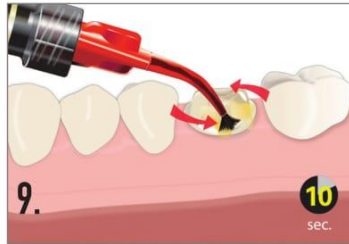


Aplikujte Peak Universal Bond 10 sekund třecím pohybem.

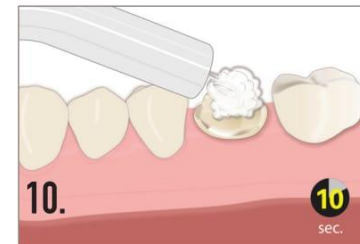


Ztenčíte vrstvu plným tlakem vzduchu 10 sekund.



Peak Universal Bond 10 sekund polymerujte.

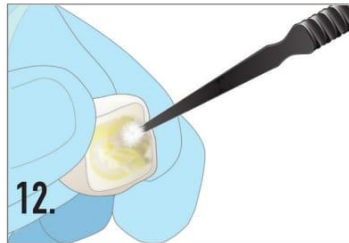

Aplikujte zirkonový primer na vzduchem narušený povrch náhrady podle instrukcí výrobce. *POZNÁMKA: Nepoužívejte zirkonový primer pro fixaci se skloionomemím nebo s pryskyřicí modifikovaným skloionomemím cementem.*

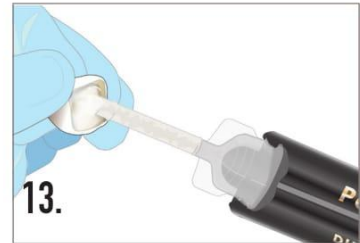

Aplikujte tenkou vrstvu pryskyřičného cementu (PermaFlo® DC) na náhradu a pevně ji usadte. Polymerujte podle instrukcí.



*VOLITELNÉ: Naneste na preparaci Consepsis. Aplikujte Peak® SE pomocí kanyly Black Mini® Brush. Ztenčíte a vysušte plným tlakem vzduchu 3 sekundy.

ULTRADENT
PRODUCTS, INC.

800.552.5512 ULTRADENT.COM

© 2014 Ultradent Products, Inc. All rights reserved.

1002274.1

022014