



UltraTemp®, UltraTemp® REZ®

Dočasný cement

Popis:

UltraTemp® je dočasný cement bez eugenolu. Je na bázi polykarboxylátu a neovlivňuje negativně bondování pryskyřic.

UltraTemp® REZ je dočasný cement bez eugenolu. Je na bázi pryskyřice a neovlivňuje negativně bondování pryskyřic.

Použití:

K dočasným aplikacím na provizorní korunky, můstky, inlaye a onlaye.

Upozornění:

Peroxidy negativně ovlivňují tuhnutí UltraTemp® REZ.

Návod k použití:

1. Sundejte uzávěr otočením proti směru hodinových ručiček a vyhodte.
2. Před nasazením míchací kanyly ověřte průtok z obou trysek stříkačky – vytlačte malé množství materiálu na míchací podložku. Dávejte pozor, aby nedošlo ke kontaminaci trysek.
3. Nasadte míchací kanylu vnitřními otvory přesně na trysky stříkačky. Zašroubujte po směru hodinových ručiček.
4. Očistěte, opláchněte a osušte preparaci. Jestliže je zub citlivý, pacient může požadovat anestezi.
5. Jestliže používáte intraorálně, pevně nasadte Intraorální kanylu.
6. Vytlačte požadované množství UltraTemp® nebo UltraTemp® REZ do dočasné náhrady nebo do vstupního otvoru zubu.
7. Nasadte dočasnou náhradu. Odstraňte přebytky pomocí vlhkého vatového tamponu.
8. Po definitivním usazení odstraňte ručním nástrojem všechny přebytky cementu.
9. Očistěte míchací kanylu a stříkačku dezinfekcí. Nesundávejte míchací kanylu do dalšího použití (novou míchací kanylu nasadte těsně před dalším použitím na dalšího pacienta).

	Čas tuhnutí
UltraTemp®	2 - 3 minut
UltraTemp® REZ – normálně tuhnoucí	2 - 3 minuty
UltraTemp® REZ – rychle tuhnoucí	1 - 2 minuty

Odstranění UltraTemp® / UltraTemp® REZ z povrchu zubu

1. Sundejte provizorní náhradu.
2. Seškrábněte zbytky cementu zaobleným /tupým ručním nástrojem.
3. Očistěte preparaci suspenzí typu pemza a kalíškem nebo kartáčkem nebo přípravkem Consepsis® Scrub a kartáčkem STAR Brush®.
4. Důkladně opláchněte před usazením trvalé náhrady.

Upozornění a varování

1. Před použitím pozorně přečtete celý návod, ujistěte se, že mu rozumíte
2. Skladujte mimo dosah dětí.
3. Nepoužívejte UltraTemp® REZ s chemickými látkami na bázi peroxidu (např. při technice „walking bleach“ – bělení za pochodu)
4. Nepoužívejte u pacientů, u nichž je známa citlivost na kyselinu polyakrylovou (polykarboxylát).

5. Pryskyřice může způsobovat citlivost. Zabraňte opakovanému kontaktu neopolymerované dentální pryskyřice s pokožkou. Nepoužívejte u pacientů, u nichž je známa citlivost na akryláty nebo jiné pryskyřice. Jestliže se objeví alergická reakce, dermatitida nebo vyrážka, konzultujte s lékařem.
6. Zabraňte vzájemné kontaminaci trysek duální stříkačky, která by mohla nastat opakovaným nasazováním a sundáváním stejné míchací kanyly.
7. Použité kanyly a prázdné stříkačky zlikvidujte správným způsobem.
8. Ověřte průtok materiálu před intraorální aplikací. Jestliže materiál neprotéká volně, vyměňte kanylu a zkuste znovu.
9. UltraTemp® REZ by měl být skladován v chladničce, aby se udržela doba použitelnosti.
10. Zabraňte kontaktu s očima.
11. Po použití UltraTemp®/ UltraTemp® REZ ponechte použitou míchací kanylu nasazenou na stříkačce až do dalšího použití cementu. Pouze dezinfikujte a otřete stříkačku i s kanylou dezinfekcí střední úrovně mezi jednotlivým použitím. Míchací kanylu vyměňte před každým použitím na nového pacienta.

POZNÁMKA: MSDS a další informace o použití UltraTemp® najdete na to www.ultradent.com

R_X pouze pro profesionální použití  Recyklovat  skladovat v chladničce



nebezpečné pro životní prostředí




riziko pro zdraví

Není určeno pro injekce. Po použití zničit.


Stupnice nebezpečnosti

- 4 = značné
- 3 = vážné
- 2 = střední
- 1 = nízké
- 0 = minimální


UltraTemp® REZ Fast
(báze a katalyzátor)

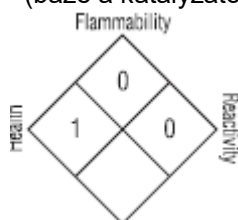

UltraTemp®
(báze a katalyzátor)

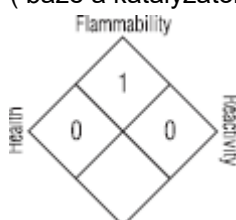

UltraTemp® REZ Regular
(báze a katalyzátor)

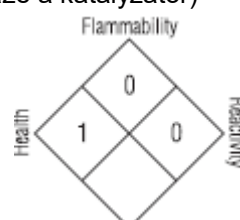

Přechovávejte mimo dosah dětí.


Stříkačky Ultradent mají na boku vyražené datum expirace, které se skládá z 1 písmena a 3 číslic. Písmeno značí šarži používanou pro výrobní účely a 3 číslice jsou datum expirace. První dvě číslice značí měsíc a třetí číslice rok.

  0044 Ultradent Products GmbH
Am Westhoyer Berg 30
51149 Cologne
Germany

**For product SDS please see our
website: www.ultradent.com
1-800-552-5512; 801-572-4200**

UltraTemp® And UltraTemp® REZ
Temporary Cement

U.S. federal law restricts the sale of this device by or on
the order of a dentist.

 Manufactured by:
Ultradent Products Inc
505 West 10200 South
South Jordan, Utah 84095 USA
Made in USA

 
© Copyright 2015 Ultradent Products, Inc. All Rights Reserved.
59196.4 082715

Rev. 02_2016