

BITE COMPOUND

Termoplastický otiskovací materiál k registraci skusu

Pouze pro použití zubním lékařem v doporučené indikaci.

DOPORUČENÉ INDIKACE

Kontrola okluzních registrací skusu.

NÁVOD K POUŽITÍ

Nechte změkhnout nad plamenem nebo v teplé vodní lázeň a aplikujte v plastické konzistenci na určené místo. Ten správný okamžik pro otisk je, když BITE COMPOUND nevytváří při roztažení žádná vlákna, ale je stále dobře tvarovatelný.

Poznámka:

Nepoužívejte u pacientů příliš horký materiál (nad 45 ° C).

SKLADOVÁNÍ

Pro zachování optimálních vlastností se doporučuje skladovat při běžné pokojové teplotě (4–25 ° C) (39,2–77,0 ° F).

BALENÍ

Standardní balení: 120 g (15 tyčinek)

UPOZORNĚNÍ

1. V případě kontaktu s očima, vyjměte a propláchněte vodou.
2. Ve výjimečných případech může výrobek způsobit přecitlivělost u některých osob. Pokud se takové reakce vyskytnou, přestaňte výrobek používat a obraťte se na lékaře.
3. Vždy by měly být používány osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou rukavice, obličejové masky a ochranné brýle.

Některé výrobky, které jsou uváděné v návodu k použití, mohou být klasifikovány jako nebezpečné podle GHS. Vždy se seznamte s bezpečnostními listy, které jsou k dispozici na adrese:

<http://www.gceurope.com>

Můžete je také získat u svého dodavatele.

Hlášení nežádoucích účinků:

pokud obdržíte upozornění o jakémkoli nežádoucím účinku, reakci či podobných událostech, které jsou spojeny s používáním tohoto přípravku, a to včetně těch, které nejsou uvedeny v tomto návodu k použití, oznamte to přímo prostřednictvím příslušného systému hlášení nežádoucích účinků příslušnému úřadu ve vaší zemi, který je přístupný v následujícím odkazu: https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en stejně jako našemu systému hlášení nežádoucích událostí:

vigilance@gc.dental

Tímto způsobem přispějete ke zvýšení bezpečnosti tohoto produktu.

Datum poslední revize: 12/2017



DISTRIBUTED by
GC CORPORATION

76-1 Hasunuma-cho, Itabashi-ku, Tokyo 174-8585, Japan
Researchpark Haasrode-Leuven 1240, Interleuvenlaan 33,
B-3001 Leuven, Belgium TEL: +32 16 74 10 00

GC ASIA DENTAL PTE. LTD.

5 Tampines Central 1, #06-01 Tampines Plaza, Singapore 529541 TEL: +65 6546 7588

MANUFACTURED by

NIMI CHEMICAL INDUSTRIAL CO., LTD.

4-13 Yokoyama-cho, Kiryu, Gunma 376-0055, Japan

PRINTED IN JAPAN