

# **CARIES DETECTOR**

## **NÁVOD K POUŽITÍ**

### **Klinický postup**

Nejprve odstraňte změkklý a výrazně zbarvený dentin z kariézního zubu. Poté kápněte do kavity 1 kapku CARIES DETECTOR, nechte působit 10 sekund a vypláchněte vodou. Pouze vnější vrstva kariézního dentinu je zbarvena do červena. Kompletně odstraňte zbarvenou tkáň a pečlivě vynechejte tkáň nezbarvenou. Sklovina s reziduálním karies a plakem se rovněž zbarví do červena a je třeba ji odstranit. Opakujte postup s CARIES DETECTOR tak dlouho, až se neobjeví žádné zbarvení dentinu. V žádném případě nesmí působit CARIES DETECTOR déle než 10 sekund, neboť by došlo ke zbarvení vnitřní vrstvy zdravého dentinu.

### **Informace**

Tato technika dává zubnímu lékaři jistotu, že odstraní veškerý infikovaný kariézní dentin. Dentin, který není karies napaden, i dentin, u kterého je možnost mineralizace, může zůstat zachován. Další přednost: CLEARFIL BONDING SYSTEMS drží dokonce na vnitřní vrstvě dentinu, s možností nové mineralizace, a je možné je nanést ihned, bez podříznutí. Při této technice jsou rovněž možné plošší kavity (kvůli zachování dentinu s možností nové mineralizace), přičemž se na nejnižší možnou míru omezuje podráždění pulpy.

### **Preventivní opatření**

1. Kvůli vyloučení kontaminace se nesmí preparát nanášet přímo z lahve do kavity.
2. Při vniknutí preparátu do očí ihned vypláchněte vodou a konzultujte s lékařem.
3. Při kontaktu preparátu s pokožkou či oděvem ihned omyjte postižené místo mýdlem a vodou.
4. Výrobek je hořlavý – nesmí přijít do styku s otevřeným ohněm.

### **Skladování**

1. Nepoužívejte po datu doporučené spotřeby, které je uvedeno na obalu.
2. Skladujte při teplotách pod 25°C. Nevystavujte přímému slunečnímu záření. Po použití nádobku dobře uzavřete a skladujte mimo dosah dětí.

[ZÁRUKA]

KURARAY MEDICAL INC. nahrazuje všechny prokazatelně vadné výrobky. KURARAY MEDICAL INC. neručí za přímou, následnou nebo neobvyklou ztrátu nebo škodu, která vznikla aplikací nebo použitím či neschopností použít tento výrobek. Uživatel je povinen před použitím určit vhodnost výrobku pro zamýšlený účel použití a přebírá tak na sebe všechna rizika a závazky s tím spojené.

[POZNÁMKA]

CLEARFIL je chráněná značka firmy KURARAY CO., LTD.

Vyrobena v:

**KURARAY MEDICAL INC.**

1621 Sakazu, Kurashiki, Okayama 710-0801, Japan

Distribučováno:

**KURARAY EUROPE GmbH**

Building F821, Hoechst Industrial Park

65926 Frankfurt am Main, Germany

Phone: +49(0)69 305 35 840 Fax: +49 (0)69 305 35 640

Distributor pro ČR:

KURADENTAL s.r.o.

Mirovická 1688 / 20; 182 00 Praha 8

Tel: + 420 776 58 61 62

E-mail: [info@kuradental.cz](mailto:info@kuradental.cz)