

Sada zdravotnických prostředků určená pouze pro profesionální použití
Všechny jednotlivé součásti mají označení CE
Sekční matricový systém

Návod k použití

Popis

Sada myQuickmat Prime umožňuje jednoduchou a přirozenou rekonstrukci proximální anatomie molárů i premolárů. Odstranění klínu jako samostatného prvku výplňového postupu zjednodušuje celkový postup a zkracuje čas na křesle. Tato sada obsahuje myRing Prime, sekční matricový kroužek s integrovaným klínkem pro snadné restaurování zadních dutin II. třídy. Díky klínovitým koncům poskytuje myRing Prime účinnou bi-laterální separaci, dobré cervikální těsnění a dobrou adaptaci matrice jak na molárech a premolárech, tak mezi premoláry a moláry. Sada obsahuje sekční matrice Quickmat Prime, které umožňují přesné umístění kontaktního bodu v blízkosti ekvátoru u restaurací třídy II. Středový horní výstupek je užitečný pro snadné umístění matric Quickmat Prime na moláry i premoláry. Optimální rekonstrukce lze dosáhnout pomocí myRing Prime s maticemi Quickmat Prime. Všechny ostatní sekční matrice Polydentia však lze použít s myRing Prime. Podobně lze sekční matrice Quickmat Prime použít s jinými sekčními matricovými kroužky (myRing Forte, myRing Classico).

Složení

myRing Prime: nerezová ocel | myTines Prime: termoplast | Sekční matrice Quickmat Prime: nerezová ocel

Indikace

Sada myQuickmat Prime je indikována pro výplň II. třídy na moláru i premoláru, aby se vytvořil kontaktní bod v blízkosti rovniku zubu.

Kontraindikace

Nejsou známy.

Vedlejší účinky

Neexistují žádné známé vedlejší účinky. Případné závažné nežádoucí příhody hlase neprodleně distributorovi nebo společnosti Polydentia.

Vzájemné ovlivňování s jinými zdravotnickými prostředky nebo výrobky

Nejsou známy žádné případy vzájemného ovlivňování.

Informace pro pacienta

V souvislosti se sadou myQuickmat Prime kit není nutné poskytovat pacientovi žádné informace.

Uchovávání a skladování


Uchovávejte na čistém, suchém místě a chraňte před vlhkem nebo příliš vysokou vlhkostí vzduchu.

Varování

Vzhledem k přítomnosti malých a ostrých součástí vždy použijte kofferdam, abyste zabránili náhodnému spolknutí nebo vdechnutí. myRing Prime vždy zajistěte dentální nití. V případě náhodného vdechnutí nějaké ze součástí sady myQuickmat Prime kit (matrice, přidržovacího kroužku nebo jeho koncovek) okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. V případě spolknutí některé ze součástí sady myQuickmat Prime kit důrazně doporučujeme vyhledat lékařskou pomoc a spolknutou součást lokalizovat. Pokud se po spolknutí rozvine nějaké onemocnění, vyhledejte ihned lékaře. Všechny výrobky na opakované použití od Polydentia jsou dodávány nesterilní a před prvním použitím je třeba je řádně dezinfikovat, vyčistit a sterilizovat. Postup najdete v pokynech k čištění, dezinfekci a sterilizaci na webu www.polydentia.ch.

Použití

① **Preparace kavity:** Odstraňte kariezní lézi a připravte zub konzervativní preparací II. třídy. Pro co nejjednodušší umístění matrice doporučujeme připravit zcela otevřený kontakt. ② **Nasazení matrice:** Pro standardní kavity II. třídy na molárech i premolárech používejte matrice Quickmat Prime. Prsty nebo pinzetou umístěte konturovanou sekční matici tak, se středovým výstupkem směrem k okluznímu okraji. Pro snadné umístění doporučujeme uchopit centrální jazýček matrice pomocí kleští myQuickmatrix a nasadit ji z okluzního směru. V případě hlubokých dutin lze místo matric Quickmat Prime použít matici s cervikálním nástavcem. ③ **Nasazení myRing Prime:** Kroužek uchopte různě podle použitých kleští: 3a - u kleští myForceps použijte prohlubeň, 3b - u gumových kleští otvory. Dostatečně kroužek rozevřete. Opatrně nasadte myRing Prime pokud možno co nejbližší k dásni. ④ **Vyhlazení matrice:** V zájmu zajištění perfektního bodu kontaktu vyhladte matici hladítkem (kulíčkou) nebo pinzetou. ⑤ **Aplikace výplně do kavity:** Vyplňte kavitu materiálem dle pokynů výrobce. ⑥ **Vyjmutí systému sekčních matic:** Sejměte myRing Prime a matici. Matrice se nejsnáze odstraňuje pomocí kleští myQuickmatrix Forceps od společnosti Polydentia. ⑦ **Konečná úprava a leštění:** Tenkým vrtáčkem odstraňte případný malý přebytek a výplň vyleštíte podle doporučení výrobce.

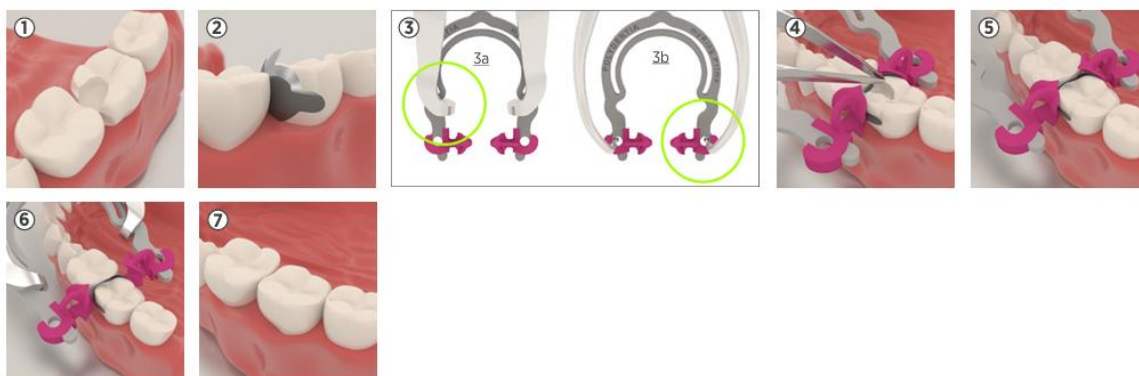

Likvidace

Matrice nelze vzhledem k jejich složení sterilizovat, a proto se jedná o zdravotnické prostředky na jedno použití. Nepoužívejte je opakovaně. Prostředky kontaminované potenciálně infekčními látkami lidského původu řádně zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

Obnova kroužků

Postup, jak účinně a bezpečně provádět obnovu kroužků myRing Prime a jejich koncovek, najdete v pokynech k čištění, dezinfekci a sterilizaci na webu www.polydentia.ch.


Tipy a triky při používání sady myQuickmat Prime kit

Zlepšení adaptace maticového pásma

Po nasazení myRing Prime může být v některých případech nutné zlepšit adaptaci matrice v krční oblasti. V tomto případě lze použít teflonovou pásku. Když je kroužek stále na místě, vložte teflonovou pásku mezi špičky obou hrotů a pevně ji přitlačte k matrici, dokud nedosáhnete požadovaného uložení krčku.

Sejmutí koncovek [Ⓐ] [Ⓑ]

Koncovky jsou vyměnitelné a dodávají se spojené v párech. Koncovky je nutné před čištěním či sterilizací sejmut. Při snímání koncovek je důležité nepoškodit vnitřní anatomická křídélka. Koncovky uchopte vždy za vnější část.  Uchopte zde.  Neuchopujte zde.

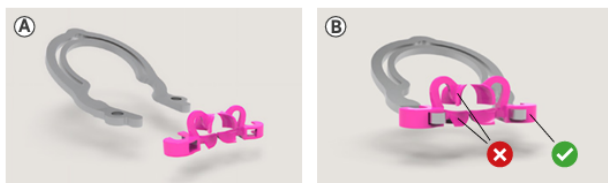

Plastové součástky se po delším používání vždy opotřebovávají. Před každým použitím vždy zkontrolujte myTines Prime. Jakmile se objeví známky poškození, vyměňte myTines Prime. Poškozené zdravotnické prostředky se již nesmí používat a musí se zlikvidovat.

Vyplnění MOD kavit a více zubů

Při restaurování MOD doporučujeme restaurovat mezální a distální stěnu jako samostatné proximální dutiny.

Obnovení myRing Prime [Ⓒ] [Ⓓ]

Pokud dojde k nadměrnému rozevření myRing Prime, lze jej obnovit pomocí kleští myForceps od Polydentia následujícím způsobem: **1.** Nejprve sejmete koncovky. **2.** Nasadte myRing Prime do zářezů na kleštích. **3.** Zmáčknutím kleště uzavřete, aby myRing Prime získal zpět svůj tvar.  Zmáčkněte.

