

Všechny jednotlivé součásti mají označení CE
Sada zdravotnických prostředků určená pouze pro profesionální použití
Systémy sekčních matic

Návod k použití

Popis

Sada obsahuje myRing Forte, kroužek pro sekční matrice, který se díky svým koncovkám (myTines Small, myTines Medium a myTines Large) dokáže přizpůsobit zubům s různou výškou korunky i širokým kavitám. V případě odlišné morfologie zubu můžete použít různé autoklávatelné koncovky myTines, aby se zlepšila adaptace matrice. Koncovky jsou vzájemně zaměnitelné. Sada obsahuje vysoce kvalitní anatomicky tvarované mezizubní plastové klínky myWedge. Zásluhou dutého tvaru písmene V se dokáže stlačit a přizpůsobit prostoru mezi zuby, čímž předchází poškození papily. V sadě naleznete rovněž sekční matrice LumiContrast. Tyto tmavě modré zmatrice výrazně zvyšují kontrast a redukují oslnění, zejména při použití lupových brýlí nebo mikroskopu.

Složení

myRing Forte: nerezová ocel | myTines: termoplast | Matrice Quickmat: nerezová ocel | Matrice LumiContrast: nerezová ocel
myWedge: termoplast | myForceps: nerezová ocel

Indikace

Sada myQuickmat Forte kit je určena k silné separaci zubu za účelem vytvoření bodů kontaktu při zhotovování výplní kavit II. třídy. Kroužek myRing Forte má anatomicky tvarované, opakovaně použitelné koncovky, které zajišťují dokonalou adaptaci matrice. Sada obsahuje rovněž myWedge, který formuje matricový proužek k anatomii cervikální oblasti zubu.

Kontraindikace

Nejsou známy.

Vedlejší účinky

Neexistují žádné známé vedlejší účinky. Případné závažné nežádoucí příhody hlaste neprodleně distributorovi nebo společnosti Polydentia.

Vzájemné ovlivňování s jinými zdravotnickými prostředky nebo výrobky

Nejsou známy žádné případy vzájemného ovlivňování.

Informace pro pacienta

V souvislosti se sadou myQuickmat Forte kit není nutné poskytovat pacientovi žádné informace.

Uchovávání a skladování

Uchovávejte na čistém, suchém místě a chráňte před vlhkem nebo příliš vysokou vlhkostí vzduchu.


Varování

Vzhledem k přítomnosti malých a ostrých součástí vždy použijte kofferdam, abyste zabránili náhodnému spolknutí nebo vdechnutí. myRing Forte vždy zajištěte dentální nití. V případě náhodného vdechnutí nějaké ze součástí sady myQuickmat Forte kit (matrice, kroužku nebo jeho koncovek či klínků) okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. V případě spolknutí některé ze součástí sady myQuickmat Forte kit důrazně doporučujeme vyhledat lékařskou pomoc a spolknutou součást lokalizovat. Pokud se po spolknutí rozvine nějaké onemocnění, vyhledejte ihned lékaře.

Všechny výrobky na opakované použití od Polydentia jsou dodávány nesterilní a před prvním použitím je třeba je řádně dezinfikovat, vyčistit a sterilizovat. Postup najdete v pokynech k čištění, dezinfekci a sterilizaci na webu www.polydentia.ch.

Použití

① **Preparace kavity:** Odstraňte kariezní lézi a připravte zub konzervativní preparací II. třídy. Matrici lze nasadit i v případě, že bod kontaktu nebyl zcela porušen. ② **Nasazení matrice:** Vyberte vhodný matricový proužek podle morfologie zubu a typu výplně. Prsty nebo pinzetou umístěte konturovanou sekční matrici tak, aby konkávní okraj směřoval k okluzi. ③ **Zavedení klínku:** Vyberte klínek myWedge vhodné velikosti k uzavření gingivální hrany a důkladně jej zasuňte. V případě potřeby přidržeť prst na matricovém proužku, aby během umísťování klínku nedošlo k jeho uvolnění. ④ **Nasazení myRing Forte:** Kleštěmi myForceps Polydentia roztáhněte myRing Forte. Dostatečně kroužek rozevřete. Opatrně jej nasadte přes klínek, pokud možno co nejbliže k dásni. ⑤ **Vyhlazení matrice:** V zájmu zajištění perfektního bodu kontaktu vyhladte matrici hladítkem (kuličkou) nebo pinzetou. ⑥ **Aplikace výplně do kavity:** Vyplňte kavitu materiálem dle pokynů výrobce. ⑦ **Vyjmutí systému sekčních matic:** Sejměte myRing Forte, klínek a matrici. Matrice se nejsnáze odstraňuje pomocí speciálních kleští myQuickmatrix Forceps od Polydentia. ⑧ **Konečná úprava a leštění:** Tenkým vrtáčkem odstraňte případný malý přebytek a výplň vyleštete podle doporučení výrobce.

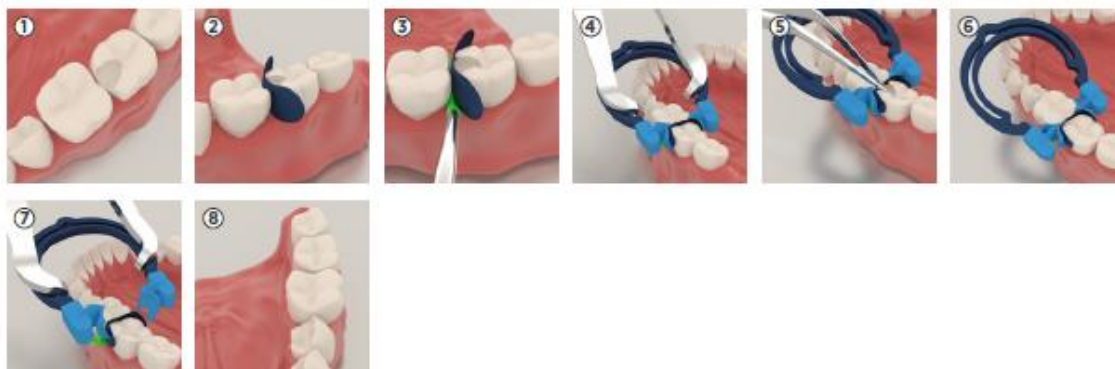

Likvidace

Matrice nelze vzhledem k jejich složení sterilizovat, a proto se jedná o zdravotnické prostředky na jedno použití. Nepoužívejte je opakovaně. Prostředky kontaminované potenciálně infekčními látkami lidského původu řádně zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

Obnova kroužků

Postup, jak účinně a bezpečně provádět obnovu kroužků myRing Forte a jejich koncovek, najdete v pokynech k čištění, dezinfekci a sterilizaci na webu www.polydentia.ch.

Tipy a triky při používání sady myQuickmat Forte kit

Sejmutí koncovek A B

Koncovky je nutné před čištěním či sterilizací sejmout. Při snímání koncovek je důležité nepoškodit vnitřní anatomická křídélka. Koncovky uchopte vždy za vnější část. ✓ Uchopte ZDE. ✗ NE uchopujte ZDE.



Nasazení koncovek na kroužek myRing Forte © ⑩

Koncovky jsou vyměnitelné a dodávají se spojené v párech. Ty od sebe lze snadno oddělit, avšak nesmí dojít k poškození vnitřních anatomických křídélek. Proto na ně při oddělování netlačte. Koncovky na myRingForte nasadte podle obrázků. ⑩ SPRÁVNÉ UMÍSTĚNÍ: Část koncovky myTines ve tvaru V musí směřovat dolů, aby se do ní vešel klínek. SPRÁVNÉ SEJMUTÍ: Koncovky myTines uchopte a zatáhnutím sejměte z kroužku. Nikdy je neuchopujte za křídélka.



Vyplnění MOD kavit a více zubů ⑪

Kroužky myQuickmat Forte jsou navrženy tak, aby bylo možné při vyplňování MOD kavit a více zubů nasadit přes sebe. **1.** Připravte dutiny způsobem popsaným v návodu k použití, krok 1. **2.** Na meziální a distální povrchy vyplňovaného zubu nasadte matrice a klínky. **3.** Nasadte kroužek myRing Forte. **4.** Dokončete výplně způsobem popsaným v návodu k použití, kroky 5–8.



Vyplnění sousedních kavit ⑫

Tvar koncovek myRing Forte umožňuje dokonalou adaptaci meziálních a distálních povrchů dvou sousedních zubů. Díky tomu lze vyplňovat dvě sousední kavity současně. **1.** Připravte dutiny způsobem popsaným v návodu k použití, krok 1. **2.** Na oba vyplňované zuby nasadte matrice a klínky. **3.** Nasadte kroužek myRing Forte. **4.** Dokončete výplně způsobem popsaným v návodu k použití, kroky 5–8.



Obnovení myRing Forte ⑬ ⑭

Pokud dojde k nadměrnému rozvětvení myRing Forte, lze jej obnovit pomocí kleští myForceps od Polydentia následujícím způsobem: **1.** Nejprve sejměte koncovky. **2.** Nasadte myRing Forte do zářezů na kleštích. **3.** Zmáčknutím kleště uzavřete, aby myRing Forte získal zpět svůj tvar. ⑬ Zmáčkněte.

