

Použití

Vyberte vhodnou přední matici: Pro frontální výplně zahrnující proximální plochy zvolte ① Unica Proximal nebo ② Unica Proximal Deep. Použijte matici ③ Unica Proximal Deep určenou speciálně pro paradontologické aplikace s plochou papilou. V náročných případech vyžadujících obnovu krčků a proximálních ploch (kompletní fazeta) použijte matici Unica anterior nebo Unica Minideep anterior. ③ Zvolte Unica anterior pro: horní střední řezáky, horní postranní řezáky, špičáky. ④ Zvolte Unica Mminideep anterior pro: horní a mandibulární postranní řezáky, mandibulární střední řezáky, konoidní zuby, trojúhelníkové zuby, čípkové postranní řezáky, zuby s úzkým průměrem krčku.

Unica Proximal anterior matrices




Unica anterior matrices



Jak umístit Unica Proximal a Unica Proximal Deep: ⑤ Vyberte matici a jemně ji posuňte do její interproximální oblasti. ⑥ Zajistěte matici mezi papilou a zubem subgingiválně. ⑦ K zajištění matrice lze použít interproximální klín (např. myWedge), ale není to nutné.



Jak umístit Unica anterior a Unica minideep anterior: ⑧ K proximálnímu zavedení Unica použijte nasazovací křídélka. V případě těsného prostoru vkládejte jedno křídélko po druhém. ⑨ Opatrně vytáhněte matici palatinálně za nasazovací křídélka. ⑩ Zatlačte cervikální spojku do gingiválního sulku. ⑪ Vložte myWedge a upevněte matici na místě.

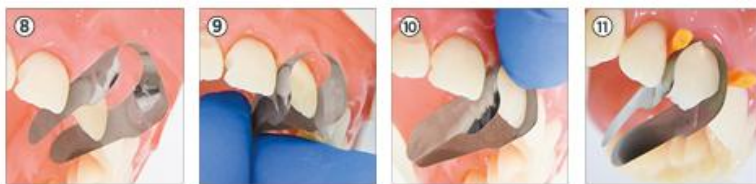

Likvidace

Matrice a klíny nelze vzhledem k jejich složení sterilizovat, a proto se jedná o zdravotnické prostředky na jedno použití. Nepoužívejte je opakovaně. Prostředky kontaminované potenciálně infekčními látkami lidského původu řádně zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

Tipy a triky

Upevněte matici Unica anterior a Unica minideep anterior na místě pomocí tekutého koferdamu pro případ, že by hrozilo posunutí nebo deformace matrice klínem. Ano. Ne.

