



Prophypaste Pro

Oblasti použití:

Lešticí pasta pro profesionální čištění zubů v dentální oblasti. Částice současně zajišťují velmi efektivní čisticí výkon a nejlepší výsledky leštění.

Použití:

Při dávkování profylaktické pasty o velikosti třešně na lešticí kartáček lze ošetřit skupinu 2–3 zubů. Pokud se na povrchu zubu nacházejí zbytky, měly by být ošetřeny čerstvým množstvím profylaktické pasty. Aby se zabránilo rozstříkávání materiálu a vzniku tepla, doporučuje se pracovat při nízkých otáčkách s nylonovým lešticím kartáčkem (cca 3000 ot./min).

U pacientů s obnaženým dentinem se doporučuje následující postup: nejprve ošetřit oblasti zubní skloviny čerstvým množstvím profylaktické pasty a následně oblasti dentinu.

