

HybenX®

Přípravek k ošetření tkání v dutině ústní, anti- biofilm

Jen pro profesionální použití

Návod k použití

INDIKACE:

HybenX se používá k odstranění zubního plaku – biofilmu, pokud je podle názoru lékaře nutné další doplňující ošetření při odstraňování plaku – biofilmu. HybenX je určen k jednorázovému použití; jedná se o roztok, který působí povrchově a v ústní dutině se nanáší lokálně. HybenX se aplikuje pomocí injekční stříkačky nebo jiné vhodné pomůcky, zvolené lékařem.

POPIS:

HybenX obsahuje sulfonové fenoly ve vodním roztoku, které denaturují tkáň. HybenX je fialová viskózní tekutina nebo gel.

NÁVOD:

HybenX se nanáší výhradně povrchově pomocí injekční stříkačky nebo jiné lékařem zvolené pomůcky na dásně nebo do periodontálních kapes, které jsou v okolí postižených zubů. Ošetření by mělo být prováděno v jednotlivých kvadrantech. Přípravek by neměl působit déle než 20 vteřin. HybenX je nutné z ústní dutiny odstranit důkladným vypláchnutím vodou a rychlým odsátím. Odstranění přípravku je nutné k dokončení procesu čištění. Zbytky přípravku odstraňte odborným způsobem.

POZNÁMKA:

V případě, že pacientovi nebylo provedeno žádné lokální umrtvení, způsobuje přípravek během použití pálivý pocit, dokud není vypláchnut. Při náhodném kontaktu s ústní sliznicí dojde k jejímu zblednutí do doby, než se opět rehydratuje. Z důvodu viskozity HybenX se doporučuje vždy používat injekci s kanylou.

HybenX nesmí být použit s hydroxidem vápenatým a s dalšími podobnými produkty. HybenX se používá v původním viskózním skupenství. Po zředění s vodou a/nebo v kombinaci s jinými produkty se přípravek může stát neúčinným nebo dokonce škodlivým.

UPOZORNĚNÍ:

Uchovávejte mimo dosah dětí. **Nepoužívejte, pokud je pacient alergický na látky, které v jakékoliv formě obsahují síru.** Vzhledem k vlastnostem přípravku by mělo být zamezeno jeho delšímu působení na zdravé tkáň. HybenX může poškodit ošetřovanou tkáň, pokud se použije příliš velké množství přípravku a dojde k výraznému překročení doporučené doby působení. Je důležité odsát zbytky přípravku rychle, aby se zabránilo jeho proniknutí na místa, která není nutné ošetřovat.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

HybenX je určen výhradně k použití v dutině ústní. Zamezte kontaktu s očima. Pokud přesto dojde ke kontaktu s očima, okamžitě odstraňte kontaktní čočky a vyplachujte oči nejméně 15 minut vlažnou vodou. Při kontaktu s pokožkou okamžitě důkladně opláchněte vodou. HybenX způsobuje poškození obléčení a tkanin. Bezpečnost a účinnost u těhotných žen a dětí pod 12 let nebyla testována.

VEDLEJŠÍ ÚČINKY:

HybenX může při použití způsobovat lokální podráždění a otoky. Je důležité důkladně vypláchnutí vodou a rychlé odsátí. Pokud se objeví nadměrné podráždění, přerušte ošetření.

BALENÍ:

1 ml ve stříkačce

Uchovávejte při pokojové teplotě, 15 – 30 °C.

SLOŽENÍ:

Kyselina hydroxybenzensulfonová, kyselina hydroxymethoxybenzensulfonová, kyselina sírová, (gel obsahuje koloidní oxid křemičitý), FD&C Red 40 (Allura červená AC).