

Variolink® Esthetic Try-In Paste

[cs] Návod k použití

Glycerinová zkušební pasta rozpustná ve vodě

Date information prepared:
2023-11-13/Rev. 0
web



Manufacturer:
Ivoclar Vivadent AG
Benderstrasse 2
9494 Schaan/Liechtenstein
www.ivoclar.com

ivoclar

Česky

Popis

Zkušební pasty Variolink® Esthetic jsou glycerinové pasty rozpustné ve vodě. Zkušební pasty umožňují simulaci odstínového efektu všech keramických náhrad (fazet, inlejí, onlejí, korunek a můstků), které se mají cementovat pomocí tmelového kompozitu Variolink Esthetic. Je důležité mít na paměti, že odstín a průsvitnost zkušebních past odpovídá **vytvrzenému (!)** tmelovému kompozitu Variolink Esthetic.

Odstíny

Variolink Esthetic Try-In je k dispozici v následujících šesti odstínech:

Odstín	Efekt
Light +	Světlejší / bělejší
Light	✓
Neutral	Žádný
Warm	✓
Warm +	Tmavější / žlutější
White opaque	Maskování diskolorované struktury zubů

Odstín zkušební pasty se může mírně lišit od odstínu příslušného nevytvrzeného kompozitního tmelu, protože tmelový kompozit získá svůj konečný odstín až po vytvrzení. Odstínový efekt zkušebních past je zkoordinován s odstínem plně vytvrzeného tmelového kompozitu stejné tloušťky.

Složení

Zkušební pasty Variolink Esthetic obsahují glycerin, minerální plniva a anorganická plniva.

Nežádoucí účinky

Hygroskopické zkušební pasty způsobují pohyb tekutiny v dentinových kanálcích. V důsledku toho se pacient může po určitou dobu cítit nepříjemně. Proto by se měla zkušební procedura provádět při anestezii nebo po znecitlivění pomocí místní anestezie.

Interakce

Z náhrady i zubu vodou důkladně opláchněte všechny zbytky zkušební pasty a teprve potom aplikujte trvalý cement. Jinak se může vazba mezi náhradou a pastou Variolink Esthetic porušit.

Použití

- Simulace odstínu pomocí zkušebních past se musí vždy provádět před izolací pracovního pole nebo vysušením zubu, protože při sušení se dočasně zesvětluje struktura zubu.
- Naneste malé množství vybrané zkušební pasty na náhradu a pečlivě ji usad'te, aniž byste na zub vyvíjeli tlak. Pokud náhradu nelze snadno usadit, zkontrolujte její vnitřní povrch a také blízké regiony, zda někde nedochází k předčasným kontaktům. Nvtlačujte náhradu na místo násilím (nebezpečí fraktury!).
Poznámka:
Při kontrole okluze křehkých keramických náhrad byste měli dávat pozor, než je trvale zacementujete, protože hrozí nebezpečí fraktury.
- Zkušební pasty jsou rozpustné ve vodě a lze je snadno odstranit pod tekoucí vodou nebo pomocí ultrazvukových čističů. Náhrada by se měla důkladně očistit a vysušit.
- Strukturu zubu důkladně vyčistěte proudem vody.
- Následně zacementujte náhradu použitím Variolink Esthetic (viz návod k použití pro Variolink Esthetic).

Doba použitelnosti a uchovávání

- Zkušební pasty Variolink Esthetic nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti.
- Teplota uchovávání: 2–28 °C.
- Doba použitelnosti: viz údaj na stříkačkách a obalu.

Uchovávejte mimo dosah dětí!

Určeno pouze pro stomatologické účely.

Materiál byl vyvinut výlučně pro použití v zubním lékařství. Zpracování je nutné provádět výhradně podle návodu k použití. Nelze přijmout odpovědnost za škody vzniklé nedodržováním pokynů nebo stanovené oblasti použití. Uživatel odpovídá za testování materiálu z hlediska jeho vhodnosti a použití pro jakékoliv účely výslovně neuvedené v návodu. Popisy a údaje nepředstavují žádnou záruku vlastností a nejsou závazné.