

Sekční matrice Návod k použití



KT-CE-TF18-06-Annex6-01, 9. 6. 2021 (A/0)

I. Název

Název výrobku: Sekční matrice

Model: SC0501L, SC0502M, SC0503S, SC1201L, SC1202M, SC1203S, SC1301L, SC1302M, SC1303S



Huanghua Promisee Dental Co., Ltd.
Mould Industry Garden, Empolder Section, Huanghua
061100 Hebei Čína
TEL: +86-317-8882702 FAX: +86-317-8881708



MedNet EC-REP GmbH
Borkstrasse 10, 48163 Muenster, Německo

Dovozce: Medplus s.r.o.

Lidická 886/43, 736 01 Havířov - Šumbark
Česká republika
Tel.: 800 400 449

III. Obsah balení a účel použití

Výrobek je vyroben z nerezové oceli. Sekční matrice se používají především jako pomůcka při modelaci tvaru výplně a jako separační pomůcka pro vytvoření bodu kontaktu se sousedním zubem. Obvykle se používají supragingiválně.

IV. Návod k použití

1. V závislosti na poloze zubů a aktuální situaci, vyberte vhodnou matici.
2. Poté použijte zubní klínek a sekční kroužek.

V. Upozornění

1. Uchovávejte obal kompletní a zabraňte poškození výrobku tlakem.
2. Uchovávejte při pokojové teplotě.
3. Aplikujte matici tak, aby během práce nedošlo k uvolnění.

VI. Údržba

1. Výrobek skladujte v suché, větrané místnosti s pokojovou teplotou, jejíž relativní vlhkost není vyšší než 80% a nedochází zde ke korozi.
2. Vyhněte se přímému slunečnímu záření.
3. Dbejte na to, aby při uchování nedošlo k poškození výrobku.

VII. Symboly:

	Označení CE		Číslo šarže
	Zdravotnický prostředek		Datum výroby
	Datum spotřeby		Výrobce
	Upozornění		Zástupce EU
	Udržujte v suchu		Touto stranou nahoru
	Nevystavujte slunci		Návod na použití
	Modelové číslo		Vyrobeno v Číně
	Nepoužívejte opakovaně		Nesterilní