

# Harvard Bite

## NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ

**Harvard Bite** – otiskovací materiál pro registraci skusu na A-silikonové bázi

Harvard Bite je velmi tvrdý a přesný registrát skusu s vanilkovým aroma za bázi A-silikonu. Tento biokompatibilní materiál zajišťuje nezkraslenou a vysoce přesnou registraci skusu s krátkou dobou vytvrzování. Hmota může být aplikována rychle a bez bublin z kartuše v aplikační pistolí.

Tixotropní vlastnosti a stabilita spojené s Harvard Bite zabraňují úniku materiálu mimo zubní plochy a umožňují snadné vyjmutí z úst. Harvard Bite vykazuje vysokou konečnou tvrdost, není křehký a může být snadno ořezán a upraven.

**Indikace:** Materiál na registraci skusu

**Složení:** Polysiloxany; oxid křemičitý, parafin

**Kontraindikace / Vedlejší účinky:** Nejsou známy.

### **Aplikace:**

1. Příprava Vyjměte kartuši a sejměte její zámek, nasadte přiloženou míchací kanylu. Vložte kartuši do aplikační pistolí. Poznámka: Před každou první aplikací vytlačte a zlikvidujte malé množství materiálu, aby byl dosažen správný míšící poměr a hladiny obou složek v kartuši byly naprosto srovnány. Použitá míšící kanyla by měla být ponechána v kartuši jako uzávěr až do dalšího použití.
2. Pracovní doba Pracovní doba při 23 ° C je 20 sekund. Doporučený čas v ústech je 45 sekund.
3. Registrace skusu Smíšený materiál je aplikován přímo na okluzní plochy pro registraci. Čelisti by měly být uzavřeny po 20 sekund. Po dalších 45 sekundách materiál v ústech vytvrdne, a registrát může být sejmout.

**Důležité upozornění:** Vyhněte se kontaktu zubů a otiskovací hmoty Bite latexovými rukavicemi. Kontaminace latexovými rukavicemi může mít za následek nerovnoměrné tuhnutí materiálu.

Harvard Bite umožňuje přesnou kontrolu umístění sádrových modelů v artikulátoru. Registrát může být skladován po mnoho měsíců bez nebezpečí kontrakce.

**Důležitá upozornění:** Neskladujte Harvard Bite při teplotách nad 25 ° C (78 ° F)! Nepoužívejte přípravek po uplynutí doby použitelnosti! Zabraňte kontaminaci s latexovým materiálem! Určené pouze pro dentální použití! Skladovat mimo dosah dětí! Návod k použití musí být uchovávan po dobu používání materiálu. Uživatel je odpovědný za správné použití výrobku podle tohoto návodu k použití.

### **Objednací číslo:**

7083700 Harvard Bite 2 x 50 ml kartuše s 12 míšícími kanylami žluté barvy, aroma vanilka

7096000 Náhradní balení s 50 míšícími kanylami