

Hemocollagene

Vstřebatelné sterilní hemostatické houbičky

Složení

Jedna houbička obsahuje:

Nativní nedenaturovaný lyofilizovaný kolagen hovězího původu..... 0,027 g

TSE/BSE

Zhodnocení rizika přenosu virů a zvířecích přenosných spongiformních encefalopatií bylo provedeno v souladu se směrnicí 2003/32/ES.

Indikace

Lokální zástava krvácení v zubním lékařství.

Kontraindikace

Pacienti s genetickou predispozicí k alergiím nebo se známou alergií na kolagen hovězího původu v anamnéze.

Návod k použití

Před zavedením hemostatické houbičky důkladně znovu prohlédněte lůžko a odstraňte veškerou granulační tkáň a kostní drť.

Aplikujte suchou houbičku, podle velikosti krvácení s použitím tlaku či bez použití tlaku, a zajistěte, aby lůžko nevyschlo.

Pokud je to nutné, je možné houbičku zajistit v lůžku příčným stehem.

Houbička se úplně a přirozeně vstřebá.

Zvláštní upozornění a bezpečnostní opatření při použití

- Nepoužívejte v infikovaných oblastech.
- Houbičku nevlhčete.
- Všechny nepoužité kousky houbičky je nutné zlikvidovat, protože již nejsou sterilní.
- Doporučuje se:
 - používat suché a hladké nástroje,
 - aplikovat malé kousky houbičky, jen tak velké, aby vyplnily lůžko.

Před použitím zkontrolujte, zda je obal neporušený.



Nepoužívejte, pokud je obal před prvním použitím otevřený nebo poškozený.



Neresterilizujte.

Uchovávání

Aby byly houbičky uchovány sterilní a aby byly chráněny před opětovným nasátím vlhkosti, neodstraňujte teplem utěsněnou fólii a houbičky až do použití nevyjímajte ze sáčků.

Neuchovávejte v blízkosti tepelných zdrojů.

Balení

Krabička obsahuje 24 houbiček k jednorázovému použití.

Houbičky jsou sterilizovány zářením gama.

Pouze k odbornému použití v zubním lékařství.



STERILE R



SEPTODONT
58, rue du Pont de Créteil
94107 Saint-Maur-des-Fossés Cedex - France
Tel.: 33 (0)1 49 76 70 00

CE 0459
(CE) 08/1998
Rev: 12/2008