

Hydroxid Vápenatý

Návod k použití

1) Složení

Hydroxid vápenatý (30 %), síran barnatý (35 %) a polypropylen glykol (35 %).

2) Oblast použití

- Dočasný výplňový materiál pro infikované kořenové kanálky
- Částečná pulpotomie
- Apexifikace

3) Kontraindikace

Výrobek nepoužívejte, pokud je u pacienta známa alergie na některou složku obsaženou ve výrobku.




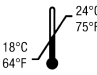

4) Opatření





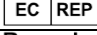
- Nevyplňujte za oblast apexu.
- Po každém použití nasadte na aplikační kanylu víčko.
- Skladujte v chladu a suchu (18–24 °C).

5) Návod k použití krok za krokem

- Po preparaci kořenového kanálku jej vyčistěte a vysušte.
- Nasadte jednorázový sterilizovaný hrot na kanylu s dodávaným kroužkem pro snadnější nasměrování hrotu.
- Dezinfikujte jednorázový hrot ethanolem.
- Pomalu vyplňte kanálek od apexu po dřeňovou dutinu jemným tlačáním na píst aplikační kanyly a zároveň kanylou pohybujte směrem k dřeňové dutině.
- Odstraňte veškeré zbytky pasty sterilizovanou vatovou peletkou.
- Odstraňte a vyhoďte použitý hrot, nasadte nový hrot a zakryjte víčkem.


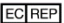
Životnost: 2 roky

	Leptavý
	Seznamte se s návodem k použití.
	Nevystavujte teplu a přímému slunečnímu světlu.
	Teplotní omezení / Skladujte při:
	Výrobce

	Datum výroby
	Číslo šarže
	Spotřebujte do
	Označení CE
	Autorizovaný EU zástupce
Rx only	Upozornění: (USA) Federální zákony omezují prodej tohoto výrobku pouze lékařům nebo na příkaz lékaře.

Pouze pro profesionální použití.

Nebezpečí! Obsahuje: Hydroxid vápenatý (30 %), síran barnatý (35 %) a polypropylen glykol (35 %).

Dodavatel (USA):
 **HENRY SCHEIN INC.**
(manufacturer)
135 DURYEA ROAD
Melville, NY 11747 USA

HENRY SCHEIN SERVICES GmbH
MONZASTRASSE 2A
D-63225 LANGEN, GERMANY
TEL: +49 6103 757 5000
 Rev.2017/09

