

FLUORIDE GEL

Návod k použití:

Příprava: Lokální aplikace k profylaxi zubního kazu.

Forma podání:

Naplňte nosič gelem do 1/3 jeho objemu. Osušte zuby a vložte nosič do úst. Ponechte v ústech po dobu 60 sekund (až 4 minuty), žvýkání usnadňuje pronikání do mezizubních prostor.

Vyjměte nosič a požádejte pacienta, aby si odstranil přebytečný gel. Informujte pacienta, aby nejedl, nepil ani si nevyplachoval ústa po dobu 30 minut.