

Výrobce : Cerkamed Wojciech Pawlowski
ul . E.Kwiatkowskiego 1
37 - 450 Stalowa Wola
POLAND

EUGENOL

SLOŽENÍ: 100% eugenol

BALENÍ: lahvička (10 ml nebo 20 ml) z hnědého skla s kapátkem

POUŽITÍ:

EUGENOL se používá jako kapalina k přípravě past určených k vyplnění kořenových kanálků a k přípravě materiálů pro dočasné vyplnění kavit. Používá se hlavně v kombinaci s oxidem zinečnatým.

NÁVOD K POUŽITÍ:

K dočasnému vyplnění kavit musí být připravena směs s konzistencí pasty, která se nelepí ani k skleněné nádobce, ani k špachtli. K vyplnění kořenových kanálků musí mít směs krémovou konzistenci.

KONTRAINDIKACE:

EUGENOL nesmí být použit u pacientů přecitlivělých na složky výrobku. Nepoužívejte pod kompozitní materiály, protože eugenol narušuje polymeraci. Nepoužívejte u těhotných žen.

UPOZORNĚNÍ:

Přípravek může dráždit kůži. Dráždí sliznice dutiny ústní. Při zasažení ústa ihned vypláchněte vodou. Přípravek dráždí oči. V případě zasažení oči ihned vypláchněte dostatečným velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití nevyvolávejte zvracení. Vypijte velké množství vody. Vyhledejte lékařskou pomoc.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

Pracovní postup



www.cerkamed.pl

Při práci s přípravkem je nutné používat kofferdam. Používejte rukavice, ochranné brýle a ochranný oděv.

UCHOVÁVÁNÍ:

Uchovávejte v těsně uzavřeném obalu ve větrané místnosti při teplotě 2-25 °C.

Přípravek nevystavujte slunečnímu záření. Uchovávejte mimo dosah dětí. Použitý obal předejte k recyklaci nebo vraťte výrobci. Datum expirace je uvedeno na etiketě výrobku.

PŘÍPRAVEK JE URČEN POUZE K DENTÁLNÍMU POUŽITÍ