

PERIO-FLUSH

Roztok pro výplach parodontálních dásňových chobotů pomocí injekčního dávkovače

MD Zdravotnický prostředek třídy I

Roztok PERIO-FLUSH je tekutý roztok připravený k použití pro irigaci a výplach parodontálních dásňových chobotů. Lze jej použít k podpoře nechrupavkové léčby parodontálních dásňových chobotů. Účinně odstraňuje pevné nečistoty z chobotu. Nemarušuje regeneraci úponu pojivové tkáně.

MECHANISMUS ÚČINKU

PERIO FLUSH je izotonický roztok minerálních solí s přidavkem kvartérní amoniové sloučeniny (domifen bromid). Hlavní účinek PERIO FLUSH spočívá v mechanickém odstranění zánětlivého obsahu z parodontálních dásňových chobotů.

INDIKACE PRO POUŽITÍ

- Zánět parodontálních dásňových chobotů, konkrétně:
 - kolem výplně třídy II nebo oblastí bez kontaktních bodů,
 - kolem zubů s obtížným prořezáváním, zejména zubů moudrosti,
 - kolem zubů určených k extrakci,
 - kolem korunek,
 - kolem zubů podporujících náhrady se sponami, svorky nebo snímatelná rovnátka,
 - kolem fixních ortodontických aparátů.
- Zánět měkkých tkání pod výplněmi jako jsou můstky;
- Zánět měkkých tkání pod zubními protézami a snímatelnými rovnátky;
- Výplach chobotů po odstranění zubního kamene.

VŠEOBECNÉ POKYNY K MANIPULACI

Pokud je to možné, zajistěte, aby roztok PERIO-FLUSH dosáhl tělesné teploty, abyste minimalizovali nepohodlí pacienta během použití. Odšroubujte uzávěr a nasadte jednorázový aplikátor našroubováním na uzávěr luer-lock injekční stříkačky. Ujistěte se, že dávkovací systém funguje správně tak, že jemně tlačíte na píst mimo úst pacienta, dokud nevidíte kapku přípravku. Pokud nebude možné přípravek vytlačit, vyměňte aplikátor a nasadte nový. Pokud bude proces úspěšně dokončen, můžete začít s pacientem pracovat. Chcete-li to provést, jemně zasuňte aplikátor dolů do spodní části parodontálního dásňového chobotu. Po dosažení dna zatáhněte hrot aplikátoru cca. 1–2 mm od dna chobotu a začněte vyplachovat pomalým tlakem na píst stříkačky. Níže naleznete podrobné pokyny, jak postupovat v různých klinických případech. Pokračujte, dokud není kapalina vytékající z chobotu čistá. Po ukončení výkonu poučte pacienta, aby veškerý zbývající přípravek vyplivl a vypláchl si ústa ústní vodou, nejlépe roztokem MUSON. Oddělte a zlikvidujte použitý aplikátor a prázdnu injekční stříkačku podle předpisů.

NÁVOD K POUŽITÍ

ZÁNĚT PARODONTÁLNÍCH DÁSŇOVÝCH CHOBOTŮ:

- **kolem výplně třídy II nebo oblastí bez kontaktních bodů**

Požádejte pacienta, aby si vypláchl ústa ústní vodou, nejlépe roztokem MUSON. Odstraňte pevný plak, dávejte pozor, abyste nepoškodili kořenový cement. Během vyplachování pohybujte aplikátorem kolem všech kořenů zubů a držte hrot blízko dna chobotu. Zkontrolujte každý zub a kořen zvlášť a ujistěte se, že je vypláchnutý veškerý zánětlivý obsah. Pokračujte ve vyplachování tak dlouho, dokud z chobotu nevytéká nějaký zánětlivý obsah nebo dokud nevytéká zubní kámen.

- **kolem zubů s obtížným prořezáváním, zejména zubů moudrosti,**

Požádejte pacienta, aby si vypláchl ústa ústní vodou, nejlépe roztokem MUSON. Odstraňte zbytky jídla pomocí sondy nebo jiného nástroje. Při vyplachování pohybujte aplikátorem kolem zubu a držte hrot co nehlouběji. Zkontrolujte každý zub zvlášť a ujistěte se, že je vypláchnutý veškerý zánětlivý obsah. Pokračujte ve vyplachování tak dlouho, dokud z chobotu nevytéká nějaký zánětlivý obsah nebo dokud z chobotu nevytékají pevné nečistoty.

- **kolem zubů určených k extrakci,**

Požádejte pacienta, aby si vypláchl ústa ústní vodou, nejlépe roztokem MUSON. Při vyplachování pohybujte aplikátorem kolem zubu a držte hrot blízko dna chobotu. Zkontrolujte každý zub zvlášť a ujistěte se, že je vypláchnutý veškerý zánětlivý obsah. Pokračujte ve vyplachování tak dlouho, dokud z chobotu výtéká nějaký zánětlivý obsah nebo zbytky zubního kamene a [dokud] není místo, kam se mají vložit extrakční nástroje, čisté.

- **kolem korunek,**

Požádejte pacienta, aby si vypláchl ústa ústní vodou, nejlépe roztokem MUSON. Odstraňte zbytky jídla pomocí sondy nebo jiného nástroje, totéž proveďte pod korunkou. Při vyplachování pohybujte aplikátorem kolem zubu a pod korunkou, přitom držte hrot co nehlouběji. Zkontrolujte každý zub zvlášť a ujistěte se, že je vypláchnutý veškerý zánětlivý obsah. Pokračujte ve vyplachování tak dlouho, dokud z chobotu či prostoru pod korunkou nevytéká nějaký zánětlivý obsah nebo pevné nečistoty. Během čekání na novou náhradu vyplňte retenční oblast pod korunkou, abyste omezili hromadění zbytků potravy.

- **kolem zubů podporujících náhrady se sponami, svorky nebo snímatelná rovnátka,**

Požádejte pacienta, aby si vypláchl ústa ústní vodou, nejlépe roztokem MUSON. Odstraňte pevný plak, dávejte pozor, abyste nepoškodili kořenový cement. Dočasně upravte základnu nebo sponu protézy a odstraňte tlakové body na sliznici. Plán na novou protetickou náhradu. Opláchněte oteký povrch dásně a poté chobot pohybem aplikátoru kolem zubu, přičemž hrot držte blízko dna chobotu. Zkontrolujte každý zub zvlášť a ujistěte se, že je vypláchnutý veškerý zánětlivý obsah. Pokračujte ve vyplachování tak dlouho, dokud z chobotu nevytéká nějaký zánětlivý obsah nebo dokud nevytéká zubní kámen.

- **kolem fixních ortodontických aparátů**

Požádejte pacienta, aby si vypláchl ústa ústní vodou, nejlépe roztokem MUSON. Odstraňte pevný plak, dávejte pozor, abyste nepoškodili kořenový cement. Přesuňte zámek do bezpečné vzdálenosti od dásně (obvykle stačí 2 mm navíc). Při vyplachování pohybujte aplikátorem kolem zubu a držte hrot blízko dna chobotu. Zkontrolujte každý zub zvlášť a ujistěte se, že je vypláchnutý veškerý zánětlivý obsah. Pokračujte ve vyplachování tak dlouho, dokud z chobotu nevytéká nějaký zánětlivý obsah nebo dokud nevytéká zubní kámen.

ZÁNĚT MĚKKÝCH TKÁNÍ POD VÝPLNĚMI, JAKO JSOU MŮSTKY

Požádejte pacienta, aby si vypláchl ústa ústní vodou, nejlépe roztokem MUSON. Použijte sondu nebo jiný nástroj k odstranění zbytků zpla z prostorů mezi můstkem a dásní, dávejte pozor, abyste na daseň příliš netlačili. Vložte aplikátor pod mezilehlý můstek ze strany vlnění dutiny ústní a začněte proplachovat, pohybujte aplikátorem po mezilehlém můstku od jednoho opěrného zubu ke druhému, přičemž dbejte na to, aby byl hrot aplikátoru co nejhlouběji. Je-li to nutné, zasuňte aplikátor z vestibulární strany a pokračujte ve vyplachování, dokud se nesmyje veškerý zánětlivý obsah. Pokračujte ve vyplachování tak dlouho, dokud z místa pod můstkem nevytéká nějaký zánětlivý obsah nebo dokud z místa pod můstkem nevytékají pevné nečistoty.

ZÁNĚT MĚKKÝCH TKÁNÍ POD ZUBNÍMI PROTĚZAMI A SNÍMATELNÝMI ROVNÁTKY

Požádejte pacienta, aby si vypláchl ústa ústní vodou, nejlépe roztokem MUSON. Dočasně upravte základnu protězy nebo rovnátek a odstraňte tlakové body na sliznici. Ujistěte se, že povrch základny zubní protězy nebo rovnátek je hladký. Pokud se úpina nezdaří, naplánujte novou protetickou náhradu. Opláchněte povrch oteklé dásně.

VÝPLACH CHOBOTŮ PO ODSTRANĚNÍ ZUBNÍHO KAMENE

Požádejte pacienta, aby si vypláchl ústa ústní vodou, nejlépe roztokem MUSON. Odstraňte pevný plak, dávejte pozor, abyste nepoškodili kořenový cement. Při vyplachování pohybujte aplikátorem kolem zubu a držte hrot co nejhlouběji. Zkontrolujte každý zub se zubním kamenem zvlášť a ujistěte se, že je vypláchnutý veškerý zánětlivý obsah. Pokračujte ve vyplachování tak dlouho, dokud z chobotu nevytéká nějaký zánětlivý obsah nebo dokud nevytéká zubní kámen.

SLOŽENÍ

Čištěná voda, domifen bromid, chlorid sodný, chlorid draselný, chlorid vápenatý, jablečné aroma, mátové aroma

KONTRAINDIKACE

Přípravek nepoužívejte u pacientů se známou přecitlivělostí na některou ze složek.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Nesou známy. U zvláště citlivých jedinců však nelze vyloučit alergickou reakci. V případě alergické reakce přestaňte přípravek používat.

OMEZENÍ POUŽÍVÁNÍ, INTERAKCE

Nepoužívejte k proplachování kořenových kanálků. Nepoužívejte injekční stříkačku nebo aplikátor, pokud existuje podezření, že je vadná či poškozená. Nepoužívejte, pokud zjistíte jakoukoli změnu vlastností přípravku.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO PACIENTY

Zabraňte vniknutí do očí. V případě kontaktu omyjte velkým množstvím vody. Pokud dojde k alergické reakci, přestaňte přípravek používat. V případě potřeby se poraďte s odborníkem.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO PERSONÁL ZUBNÍ ORDINACE

Vždy používejte osobní ochranné prostředky, jako jsou rukavice, obličejová maska a ochranné brýle. Zabraňte vniknutí do očí. V případě kontaktu omyjte velkým množstvím vody. Pokud dojde k alergické reakci, přestaňte přípravek používat. V případě potřeby se poraďte s odborníkem. Aplikátory dodávané s výrobkem jsou tupé, aby se snížilo riziko poranění, ale vždy s nimi zacházejte opatrně.

DOPORUČENÍ PRO PERSONÁL ZUBNÍ ORDINACE

Tento přípravek je určen pro použití kvalifikovaným zubním personálem v běžné populaci pacientů. Pro minimalizaci nepohodlí pacienta se doporučuje zahřát roztok na tělesnou teplotu před aplikací do parodontálního dásňového chobotu. Vždy informujte pacienta o nutnosti dodržovat správnou ústní hygienu.

VAROVÁNÍ

Chraňte povrch injekční stříkačky před znečištěním. Injekční stříkačka není vhodná pro tepelnou sterilizaci nebo namáčení do dezinfekčních činidel. Pokud dojde ke kontaminaci injekční stříkačky, nepoužívejte ji. Aplikátor a dávkovač injekční stříkačky jsou jednorázové a lze je použít pouze u jednoho pacienta. Uchovávejte mimo dosah dětí a neoprávněných osob. Používejte podle určení v souladu s pokyny výrobce. Nepoužívejte po době použitelnosti. Dobu použitelnosti  a číslo šarže  můžete nalézt na injekční stříkačce/obalu.

UCHOVÁVÁNÍ

Chraňte stříkačku proti mechanickému poškození. Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Chraňte před přehřátím. Chraňte před mrazem. Pouze pro použití zubními lékaři a kvalifikovaným stomatologickým personálem.

OBSAH BALENÍ

- 1 Injekční stříkačka (3 ml) s uzávěrem luer-lock
- 1 ochranné víčko proti světlu,
- 1 jednorázový aplikátor

nebo

- 10 injekčních stříkaček (10 x 3 ml) s uzávěrem luer-lock
- 10 ochranných víček proti světlu,
- 10 jednorázových aplikátorů.

LIKVIDACE

Likvidujte veškerý odpad v souladu s místními předpisy. Injekční stříkačku zlikvidujte po úplném vyprázdnění. Malé množství přípravku mohou být likvidovány s domovním odpadem, pokud je dobře naředěn vodou. Kódy odpadu podle Evropského katalogu odpadů: 180104 (čisté ochranné víčko proti světlu, plastový sáček, čistý aplikátor), 180103 (použitý aplikátor, použitá injekční stříkačka), 150101 (krabička, návod k použití).

ZÁRUKA

ARKONA vymění výrobky, u kterých byla prokázána závada, nebo vrátí kupní cenu. ARKONA neručí za ztrátu nebo poškození způsobené zneužitím nebo nesprávným použitím výrobku.

Jakýkoli vážný incident, ke kterému došlo v souvislosti s prostředkem, by měl být nahlášen výrobcí a příslušnému orgánu státu, ve kterém je uživatel a/nebo pacient usazen. V jakékoli korespondenci o produktu uveďte název prostředku a kód šarže.