

Výrobce : Cerkamed Wojciech Pawlowski
ul . E.Kwiatkowskiego 1
37 - 450 Stalowa Wola
POLAND

ALUSTAT

Tekutina pro zastavení krvácení

PŘED POUŽITÍM PROSÍM PEČLIVĚ PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ INSTRUKCE

PRODUKT POUZE PRO DENTÁLNÍ POUŽITÍ

SLOŽENÍ: chlorid hlinitý, voda Ph. Eur.

ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ

Produkt ALUSTAT je určen pro použití při ošetření zubů, aby zastavil mírné krvácení dásní. Chlorid hlinitý obsažený ve výrobku způsobuje vazokonstrikci malých krevních cév, v důsledku čehož se zmírní otok dásní a krvácení.

POKYNY PRO POUŽITÍ

Oteklé nebo poraněné dásně jemně masírujte vatovým tamponem namočeným v ALUSTATu, poté vypláchněte čistou vodou. Pokud je to nutné, akci opakujte.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Nepoužívejte produkt u pacientů se zvýšenou citlivostí na jakoukoli složku přípravku.

VAROVÁNÍ

Dráždí sliznici dutiny ústní, pokožku a oči.

V případě kontaktu vypláchněte okamžitě dostatečným množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc.

V případě požití vypijte dostatečné množství vody. Nevyvolávejte zvracení.

Vyhledejte lékařskou pomoc.

Při práci s produktem je nezbytné použít ochranné rukavice a ochranné brýle.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte v původním obalu při teplotě do 25 °C.

Udržujte mimo dosah dětí.

Datum expirace je uvedeno na obale.

Jakmile je obal otevřen, datum expirace se nemění, i když je obsah po každém užití řádně zabezpečen.

ZACHÁZENÍ S OBALEM PRODUKTU

Prázdné obaly by měly být zlikvidovány zodpovědně.

BALENÍ

Láhev o obsahu 10 g s kapátkem.