

Výrobce : Cerkamed Wojciech Pawlowski
ul . E.Kwiatkowskiego 1
37 - 450 Stalowa Wola
POLAND

ALUSTAT FOAM

Pěna k zastavení krvácení

PŘED POUŽITÍM PROSÍM PEČLIVĚ PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ INSTRUKCE

PRODUKT POUZE PRO DENTÁLNÍ POUŽITÍ

SLOŽENÍ: chlorid hlinitý, voda Ph. Eur., přídatné substance

ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ

Produkt ALUSTAT FOAM se používá k zastavení mírného krvácení při ošetření zubů.

Chlorid hlinitý obsažený ve výrobku působí vazokonstrikčně na malé krevní cévy, čímž se zmírní otok dásní a krvácení.

POKYNY PRO POUŽITÍ

Umístěte přiložený aplikátor na stříkačku.

Abyste zastavili krvácení:

Aplikujte produkt přímo na krvácející místo. Vypláchněte po 2 minutách. Pokud je to nutné, akci opakujte.

K zatažení tkání:

1. Aplikujte ALUSTAT FOAM do otvoru v dásni za pomoci přiloženého aplikátoru. Vypláchněte po 2 minutách.
2. Vložte retrakční kabel do otvoru v dásni a naneste na něj ALUSTAT FOAM. Vypláchněte po 2 minutách.

Produkt je určený pro vícenásobné použití, ovšem s výjimkou aplikátoru, který je určen pouze k jednorázovému použití.

Častější použití aplikátoru může způsobit riziko infekce.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Nepoužívejte produkt u pacientů se zvýšenou citlivostí na jakoukoli složku přípravku.

VAROVÁNÍ

Může způsobit podráždění sliznice dutiny ústní, pokožky a očí.

V případě přetrvávajícího podráždění vyhledejte lékařskou pomoc.

V případě požití vypijte dostatečné množství vody. Nevyvolávejte zvracení.

Vyhledejte lékařskou pomoc.

Při práci s produktem vždy používejte ochranné brýle.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte v původním obalu při teplotě do 25 °C.

Udržujte mimo dosah dětí.

Datum expirace je uvedeno na obale.

Pracovní postup



www.cerkamed.pl

Jakmile je obal otevřen, datum expirace se nemění, i když je obsah po každém užití řádně zabezpečen.

BALENÍ

Stříkačka s 0,8 g přípravku, jednorázové aplikátory.